


For at benytte TOPAZ PHD XY bord, følg vejledningen herunder.

1. Åben TOPAZ PHD
2. Hold XY bordet med begge hænder og flyt den mod PHD'ens bageste ende af bundpladen.
3. Placér bordet på bundpladen så de to ben kommer ud over hver side af bundpladen.
4. Skub hele bordet frem indtil de to ben sidder midt på bundpladen.

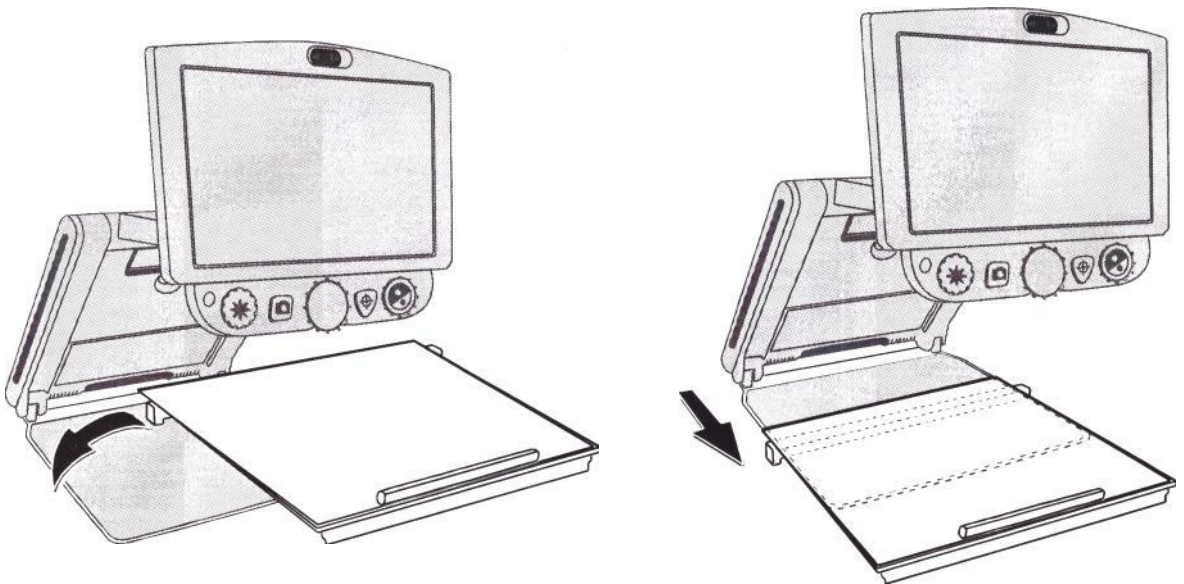

5. Placér et document på bordet, og flyt XY bordet rundt (venstre, højre, fremad, eller tilbage) indtil det ønskede område kommer op på skærmen.
6. Justér forstørrelsen, og hvis du vil, kan du bruge den orange FIND knap for at give dig et overblik over din position.
7. Fortsæt med at bevæge XY bordet og justér forstørrelsen indtil du er komfortabel med det du ser på skærmen.
8. Husk at fjerne XY bordet før du klapper enheden sammen, når du er færdig med at bruge TOPAZ PHD.