

## Connect 12 Tastatur

---

### Kommandoer

Dette dokument indeholder en oversigt over tastaturkommandoer som du kan benytte når det eksterne Connect 12 Tastatur er tilsluttet din Connect 12 enhed.

Knap	Handling
ESCAPE	Android Hjem Knap
F1	Lysstyrke Ned
F2	Lysstyrke Op
F3	Åben seneste applikationer
F4	Åben alle applikationer
F5	Åben Indstillinger (Kontekstspecifik)
F6	Start Forstørrelse
F7	Nedsæt Læsehastighed
F8	Tag billede eller Påbegynd læsning
F9	Forøg Læsehastighed
F10	Lydløs
F11	Nedsæt Lydstyrke
F12	Forøg Lydstyrke
Tænd / Sluk	Standby / Vågn op
Højre Kommando Knap (HOME)	Connect 12 Hjem
Venstre Kommando Knap (BACK)	Tilbage
Pil Op	Rul op eller Rul side op
Pil Ned	Rul ned eller Rul side ned

<b>Pil Højre</b>	Rul højre eller Fremad eller Næste side
<b>Pil Venstre</b>	Rul venstre eller Tilbage eller Forrige side
<b>Plus</b>	Zoom Ind eller Forøg tekststørrelse
<b>Minus</b>	Zoom Ud eller Nedsæt tekststørrelse
<b>Højre Alt</b>	
<b>Venstre Alt</b>	
<b>CTRL</b>	
<b>Enter</b>	Aktiver element
<b>Tryk og hold Enter</b>	Åben Kontekst Menu
<b>CTRL + Q</b>	Gå til Android
<b>CTRL + B</b>	Vis / Fjern Nederste bånd
<b>CTRL + C</b>	Indholdsfortegnelse
<b>CTRL + S</b>	Download eller Gem
<b>CTRL + L</b>	Tænd / Sluk for Lys
<b>TAB</b>	Ændre venstre del til Videnskabelig i Lommeregner

#### Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

DK-2610 Rødovre

E-mail: [info@instrulog.dk](mailto:info@instrulog.dk)

Web: [instrulog.dk](http://instrulog.dk)

Telefon: +45 44 97 94 77

Skype: Instrulog.dk

# Connect 12 Tastatur

---

## Opsætning

Inden du kan begynde at udnytte fordelene ved dit trådløse tastatur til din Connect 12 enhed skal du opsætte en forbindelse mellem de to enheder. Det gør du på følgende måde:

1. Pak dit nye trådløse tastatur ud og indsæt de medfølgende batterier. Batterierne skal sættes ind fra bagsiden af tastaturet, oppe under dækslet i højre hjørne.
2. Bag på dit Connect 12 tastatur finder du også to knapper – Skydeknappen er en Tænd / Sluk knap og til højre for den sidder en Connect (Forbind) knap. Skydeknappen vil ved modtagelsen sidde i Slukket position.
3. Tænd nu for din Connect 12 enhed. Når den er startet op skal du navigere til Android Indstillinger og videre til Bluetooth menuen. Det gør du ved:
  - a. Placer alle fem fingre på skærmen og holde dem der i cirka to sekunder.
  - b. Du lander nu på Android Skrivebord.
  - c. Naviger til og åben Indstillinger ikonet.
  - d. Under Indstillinger skal du vælge elementet Bluetooth. Sørg for at Bluetooth er deaktiveret.
4. Tænd for dit trådløse Connect 12 tastatur.
5. Tryk og hold Connect knappen nede i tre sekunder. LED indikatoren over F11 knappen vil blinke.
6. På din Connect 12 enhed skal du nu aktivere Bluetooth. Den sørger automatisk efter eksterne Bluetooth enheder.
7. Naviger til oversigten over Tilgængelig enheder og vælg punktet der hedder "Bluetooth LogicKeyboard". Aktiver elementet.
8. Du præsenteres nu for en Bluetooth parringskode. Indskriv denne på tastaturet efterfulgt af Enter.
9. Du har nu forbundet dit Connect 12 tastatur med din Connect 12 enhed.

Du skal nu sikre at tastaturet skriver dansk. Det gør du ved følgende metode:

10. Under Android Indstillinger skal du navigere til og vælge Sprog og Input.
11. Naviger nu til oversigten over Fysisk tastatur og vælg "Bluetooth LogicKeyboard".
12. Sikre dig at tastaturet står til Dansk. Gør det ikke det, skal du vælge elementet Konfigurer Tastaturlayout.
13. I den følgende oversigt du præsenteres for skal du markere Dansk, og sørge for at ingen andre sprog er markeret.

Du er nu klar til at bruge dit nye, trådløse Connect 12 tastatur.

*God fornøjelse.*

### Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

DK-2610 Rødovre

E-mail: [info@instrulog.dk](mailto:info@instrulog.dk)

Web: [instrulog.dk](http://instrulog.dk)

Telefon: +45 44 97 94 77

Skype: Instrulog.dk