

MiniVision 2 - Brugervejledning

Dansk oversættelse af Instrulog A/S

Introduktion.....	6
Hvad du finder i pakken.....	7
Produktbeskrivelse	8
Fronten	8
Øverste kant	9
Nederste kant	9
Bagcoveret.....	9
Kom godt i gang	10
Indsættelse af SIM kort.....	10
Indsættelse af batteriet	10
Oplad batteriet	10
Tænde og Slukke for din MiniVision 2.....	10
Dvaletilstand	11
Lås dit SIM kort op med PIN kode	11
Kom godt i gang	12
Det helt basale om brugergrænsefladen.....	12
Navigering gennem menuen på din MiniVision 2.....	12
Juster lydstyrken på din MiniVision 2.....	12
Brug af Talekommandoer	13
Skriv med det fysiske tastatur.....	14
Diktering ved brug af talegenkendelse.....	15
Slet en tekst.....	16
Rediger en tekst.....	16
Menu for redigeringsfelt	16
Genveje for redigeringsfelt.....	16
Tilgængelighedsgenveje.....	17
Hjemmeskærmen og Oversigt over Funktioner	18
Hjemmeskærmen.....	18
Oversigt over Funktioner.....	18
Telefon	20
Besvar et indgående opkald	20
Afslut et opkald	20
Afvis et indgående opkald.....	20
Foretag et opkald.....	20
Funktioner under igangværende opkald	22
Opkaldshistorik	22

Indstillinger.....	24
Kontaktpersoner	26
Importeret af Kontaktpersoner	26
Opret en ny kontaktperson.....	26
Rediger kontaktperson.....	27
Fjern en kontaktperson	28
Slet alle kontaktpersoner	29
Søg efter en kontakt.....	29
Ring til kontaktperson	29
Send besked til Kontaktperson	29
Del en Kontaktperson ved brug af SMS besked	29
Eksporter dine Kontaktpersoner	30
Beskeder	31
Håndtering af Beskeder under Samtaletråd	32
Send en ny besked	32
Send besked til flere modtagere	32
Videresende en besked	32
Præsenter teksten fra beskeden.....	33
Se vedhæftede fil sendt via MMS	34
Besvar en besked	34
Slet en besked fra en samtaletråd	34
Slet en samtaletråd.....	35
Slet alle samtaletråde	35
Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer	36
Ring til en afsender.....	36
Indstillinger.....	36
Håndtering af Beskeder under Kronologisk.....	37
Send en ny besked	37
Send besked til flere modtagere	38
Videresende en besked	38
Læs en modtaget besked	38
Præsenter teksten fra beskeden.....	39
Se vedhæftede fil sendt via MMS	39
Besvar en besked	39
Slet en besked	40
Slet alle beskeder	40
Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer	40
Ring til en afsender.....	41
Indstillinger.....	41

Alarm	43
Opret en alarm	43
Stop en igangværende alarm	45
Redigér en alarm	45
Aktiver / Deaktiver en alarm	45
Slet en alarm	45
Slet alle alarmer	45
Angiv en standard alarmtone	45
Planlægning	47
Tilføj en begivenhed	47
Stop alarmen for en begivenhed	48
Redigér en begivenhed	48
Slet en begivenhed	48
Slet alle begivenheder	49
Angiv en standard ringetone	49
Find en begivenhed	49
Kamera	50
Tag et billede	50
Galleri	51
Se et billede	51
Søg efter billede ud fra dato	51
Omdøb et billede	51
Send et billede via MMS	51
Billededetaljer	52
Slet et billede	52
Slet alle billeder	52
FM Radio	53
Lyt til radio	53
Angiv en radiostation som favorit	53
Farvetester	55
Annoncer farver	55
Find en farve	55
Feedback ved lokalisering af farve	55
Genkend Pengesedler	56
Opdatering af data	56
Identificer en pengeseddel	56
Lommeregner	57
Udfør en udregning	57
Lydoptager	58

Optag en lyd	58
Lyt til en lydoptagelse	58
Omdøb en optagelse	58
Slet en lydoptagelse.....	58
Noter.....	60
Opret en note.....	60
Læs en note.....	60
Rediger en note	60
Slet en note.....	60
Slet samtlige noter	60
Søg efter en note	61
Eksporter en note	62
Lommelygte.....	63
Vejr.....	64
Hvordan er vejret?	64
Få flere detaljer om vejret	64
SOS.....	65
Aktivering / Deaktivering af SOS funktionen	65
Indstilling af SOS funktionen.....	65
Indstillinger	68
Visuelle skærm	68
Skærmlæser	69
Bluetooth.....	70
Wi-Fi	71
Netværk	72
Sikkerhed.....	72
Sprog	72
Tastaturet.....	73
Dato og klokkeslæt	73
Om telefonen	74
Tekniske specifikationer	77
Fysiske mål.....	77
Hardware	77
I tilfælde af udfordringer.....	78
Min MiniVision vil ikke tænde / Jeg ser kun en sort skærm:.....	78
Det er svært at læse hvad der står på skærbilledet:	78
Min MiniVision slukker helt af sig selv:.....	78
Batteriniveauet på min MiniVision er lavt:	78
Min MiniVision vil ikke oplade korrekt:	78

Min MiniVision vil ikke forbinde til et mobilt netværk:	78
SIM kort fejl / Ingen ringefunktion er mulig:.....	78
Jeg kan ikke foretage opkald:	79
Jeg kan ikke modtage opkald:	79
Lydkvaliteten under opkald er ikke optimal:	79
Intet telefonnummer ringes op når jeg vælger en kontaktperson fra min liste:	79
Jeg kan ikke tilgå min Voicemail:	79
Mit SIM kort er låst:.....	79
Hvordan gendanner jeg min MiniVision 2?	79
Om dette dokument.....	80
Juridisk information og reklamation	81
Forholdsregler for brug og anbefalinger	81
Sundhed og Sikkerhed.....	81
Warranty (ENGELSK)	81
Specific Absorption Rate Information (ENGELSK).....	83
Kundeservice	83
Varemærker	83
Indeks – Navigationstasterne	84
Indeks – Alfanumeriske taster	86
Indeks – Tilgængelighedsgenveje	87
Indeks – Genveje under redigering	89

Introduktion

MiniVision 2 er en simpel mobiltelefon designet specifikt til ældre og synshandicappede - hvad end du er svagtseende eller blind. Med dets fysiske, alfanumeriske tastatur, en indbygget skærmlæser og med sine Talekommandoer er MiniVision 2 en 100 procent tilgængelig mobiltelefon, som endda er nem at benytte.

Brugeroplevelsen og samtlige funktioner som du finder i MiniVision 2 mobiltelefonen er blevet tilpasset så der sikres en nem indlæringskurve, til ukompliceret brug i hverdagen.

Denne brugervejledning er genereret med det formål at vejlede dig, trin for trin, til at benytte og få udbytte af de forskellige funktioner. Den supplerer Hurtig Start Guiden og giver dig mulighed for at få meget mere ud af din nye MiniVision 2 Mobiltelefon.

Hvad du finder i pakken

Din MiniVision 2 leveres med:

- Et batteri
- En strømforsyning 220 / 110 Volt – 5 Volt USB
- En ladestation
- Et micro USB kabel
- Hovedtelefoner med indbygget mikrofon
-
- En Hurtig Start Guide

Et beskyttelses etui Oversigten over tilbehør, konfiguration og produktversion kan variere fra land til land.

Designet af og specielle kendetegn for produktet og tilbehør kan ændres uden varsel.

Det anbefales altid kun at benytte KAPSYS autoriseret tilbehør. Brugen af uautoriseret tilbehør kan resultere i tab af ydeevne og / eller andre problemer, såvel som funktionsfejl der ikke dækkes af eventuel reklamation.

Produktbeskrivelse

Fronten

Fronten af din nye MiniVision 2 er opdelt i to forskellige sektioner:

Den øverste halvdel finder du en 2,3 tommer skærm som giver dig mulighed for at få en visuel reference af indholdet af din MiniVision 2. Du har rig mulighed for at justere på skærmens lysstyrke, størrelsen på tekst samt aktivere forskellige kontraster under « **Visuelle** skærm » sektionen, som du finder under Indstillinger.

Lige over selve skærmen er der placeret en højttaler som benyttes ved telefonopkald.

I den nedre halvdel af din MiniVision 2 Mobiltelefon, neden under skærmen, finder du det fysiske alfanumeriske tastatur. Det fysiske alfanumeriske tastatur er ydermere opdelt i to sektioner:

Den første og øverste del er beregnet til selve navigationen og styringen af din mobiltelefon, med mulighed for at tilgå menu systemet, justere på lydstyrken og udføre forskellige handlinger.

Navigations- og Styringstasterne er fordelt således:

En afrundet, rektangel formet joystick er placeret i midten af selve sektionen. Hver side af joysticket er klikbart og gør det muligt for dig at udføre forskellige handlinger. Igennem hele denne brugervejledning vil vi benytte følgende termer: Knapperne **Op**, **Ned**, **Venstre** samt **Højre** refererer til brugen af joysticket. Den midterste del af selve joysticket kalder vi for **OK** knappen, fordi den gør dig i stand til at godkende og / eller vælge et element.

Beskrivelse af funktionerne ved brug af joystick:

- **Op**: Navigerer til det forrige element.
- **Ned**: Navigerer til det næste element.
- **Venstre**: Nedsætter lydstyrken.
- **Højre**: Øger lydstyrken.
- **OK**: Godkender eller aktiverer det valgte element.

For yderligere information skal du venligst gennemgå sektionen « **Kom godt** i gang ».

Godt at vide: Trykker og holder du på **OK** knappen mens du befinder dig i et redigeringsfelt, vil Talegenkendelse blive aktiveret. Dette gør dig i stand til:

- Påbegynde forskellige funktioner ved brug af tale direkte fra Hjemmeskærmen eller fra oversigten over dine applikationer (nøgleord).
- Diktering af tekst ind i et redigeringsfelt.

En velfungerende internet forbindelse er nødvendig for at kunne gøre brug af Talegenkendelsen (Wi-Fi eller 3G / 4G).

For yderligere information herom, gennemgå venligst « **Brug af Talekommandoer** » samt « **Diktering ved brug af** talegenkendelse » sektionerne i denne brugervejledning.

Til venstre for joystick er **Menu** samt **Besvar opkald** knapperne, henholdsvis førstnævnte øverst og andennævnt nederst.

- **Menu** tasten symboliseres ved en visuel firkant og vil præsentere yderligere muligheder, der relaterer sig til den aktuelle funktion og / eller skærbillede, hvor du aktuelt befinder

dig. Dette vil oftest give dig adgang til eksempelvis indstillinger eller yderligere funktioner, såsom: Godkend, Send, Annuller, Slet, Redigér og så videre.

Besvar opkald knappen er symboliseret med tre vertikale grønne prikker, og du bruger tasten til at acceptere indgående opkald eller til at tilgå Telefon funktionen hurtigt og nemt. Placeret til højre for joystick er **Tilbage** samt **Afbryd opkald** knapperne, henholdsvis førstnævnte øverst og andennævnt nederst.

- **Tilbage** tasten er symboliseret med en visuel trekant, og denne gør dig i stand til at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller slette en karakter i et redigeringsfelt.
- **Afbryd opkald** tasten, som er symboliseret ved brug af tre horisontale røde prikker, bruger du til at afbryde et opkald, afvise et opkald, vende tilbage til Hjemmeskærmen - det er også denne tast du benytter til at aktivere din MiniVision 2 fra standby, ved et hurtigt tryk. Slutligt benytter du også denne knap til at slukke og tænde for din MiniVision 2, ved at trykke og holde.

I **Den nederste del** af det fysiske tastatur finder du et alfanumerisk tastatur som giver dig mulighed for at indskrive information. Det består af i alt 12 taster (4 rækker af 3 taster):

- Første række - Tasterne **1, 2** og **3**
- Anden række - Tasterne **4, 5** og **6**
- Tredje række - Tasterne **7, 8** og **9**
- Fjerde række - Tasterne **Stjerne, 0** samt **Firkant**

Tast nummer **5** er markeret med en taktil prik.

En mere specifik vejledning til brugen af det alfanumeriske tastatur finder du i sektionen « **Skriv med det fysiske** tastatur ».

Øverste kant

Oppe på toppen af din MiniVision 2 finder du en LED lampe som du kan bruge som lommelygte.

Nederste kant

Fra venstre til højre vil du finde en port til hovedtelefoner (audio jack), Micro USB porten til opladning efterfulgt af to kontakflader som bruges til forbindelse med ladestationen.

Bagcoveret

I den øverste del af bagcoveret, fra venstre til højre, finder du kameraet, som du kan bruge både til at tage billeder med Kamera applikationen, finde eller få annonceret farver med Farvetester eller Genkend Pengesedler applikationen, og ved siden af en SOS knap efterfulgt af højttaleren.

Bagcoveret på din MiniVision 2 kan fjernes helt og derved give adgang til batteriet, SIM kort bakken samt bakken til et micro SD kort.

Kom godt i gang

Indsættelse af SIM kort

Din MiniVision 2 er kompatibel med et NANO SIM kort (4FF formatet).

For at sætte SIM kortet i din MiniVision 2 mobiltelefon skal du vende telefonen om, finde indhakkets i nederste højre hjørne og løfte bagcoveret væk. SIM bakken er at finde neden under batteriet, øverst til venstre.

Placer dit SIM kort i bakken placeret til højre for selve SIM kontaktfladerne - selve chippen skal pege nedad, og det afskårne hjørne nederst til venstre. Tryk forsigtigt på SIM kortet med spidsen af din finger og langsomt og roligt skubbe det mod venstre, så det glider ind på plads.

Godt at vide: Du kan indsætte et micro SD hukommelseskort i bakken beregnet herfor - bakken finder du nederst, i selve området hvor batteriet skal monteres - indsæt et SD kort hvis du ønsker mere hukommelse til rådighed.

Indsættelse af batteriet

Indsæt batteriet i din MiniVision ved at placere bunden af batteriet i selve batteribakken først. Den nederste kant kan identificeres ved at være der hvor du finder de tre terminale forbindelser (messingkontakter). Klik derefter batteriet på plads. Til sidst skal du blot genmontere bagcoveret.

Oplad batteriet

Før du begynder at tage din telefon i brug for første gang, anbefaler vi at oplade den i mindst fire timer. Efterfølgende kan du oplade batteriet som du finder nødvendigt, alt efter brugen.

Batterilevetiden på din MiniVision 2 Mobiltelefon afhænger af, hvordan du bruger den. Jo mere du bruger den jo hurtigere vil batteriet blive fladt. Du kan optimere batterilevetiden ved at foretage enkelte justeringer og ændringer, såsom lysstyrken i skærmen, perioden for standby tilstand eller ved blot at slukke for Bluetooth og / eller Wi-Fi. For yderligere information herom, gennemgå venligst sektionen « [Indstillinger](#) ».

For at oplade batteriet skal du tage det medfølgende USB kabel og sætte det ind i din MiniVision 2, og den anden ende skal tilsluttes strømforsyningen. Herefter kan du sætte strømforsyningen til et strømstik.

Godt at vide: Du kan også gøre brug af den medfølgende ladestation til at oplade batteriet. Tilslut dit USB kabel til ladestationen i stedet for din MiniVision 2 Mobiltelefon. Nu kan du blot placere din MiniVision 2 i ladestanderen for at starte en opladning. Bemærk venligst: Det er desværre ikke muligt at gøre brug af Beskyttelses etuiet samtidigt med ladestationen, du er nødsaget til at fjerne etuiet først, før du kan placere MiniVision 2 i standeren.

Tænde og Slukke for din MiniVision 2

For at tænde for din MiniVision 2 skal du trykke og holde på **Afbryd opkald** knappen, som du finder i højre side af den første og øverste del af tastaturet. Så snart din MiniVision mobiltelefon vibrerer kan du slippe tasten. Såfremt den ikke vibrerer eller starter op, skal du tjekke hvorvidt batteriet er indsat korrekt, og hvis nødvendigt, gentage processen med indsættelse af batteriet.

For at slukke for din MiniVision skal du ligeledes trykke og holde på **Afbryd opkald** tasten. Herefter skal du godkende at du ønsker at slukke for din MiniVision ved at trykke på **OK** tasten. En hurtig vibration kan mærkes få sekunder før mobiltelefonen er helt slukket.

Dvaletilstand

Når Hjemmeskærmen er aktiveret og din MiniVision er klar til brug, kan du trykke hurtigt på **Afbryd opkald** tasten og den vil derved gå i dvaletilstand.

I denne dvaletilstand vil den visuelle skærm være slukket og tasterne på tastaturet vil være deaktiveret - alle funktioner vil dog stadig være aktive. Du vil derfor stadig kunne modtage opkald og beskeder.

For at aktivere din MiniVision mobiltelefon igen skal du blot trykke på **Afbryd opkald** tasten igen, hvorefter du vil vende tilbage til Hjemmeskærmen. Din MiniVision 2 vil som standard annoncere det aktuelle klokkeslæt samt batteriniveau.

Godt at vide: MiniVision 2 indeholder en indstilling der hedder "Vågn op annoncering". Denne indstilling giver dig mulighed for at redigere annonceringen og derved selv bestemme hvilken information du ønsker at høre, når du aktiverer din MiniVision 2 (aktuelle dato, batteriniveau, Ubesvarede opkald, Beskeder og lignende).

Brugen af denne funktion er beskrevet nærmere i « **Skærmlæser** » sektionen under Indstillinger.

Lås dit SIM kort op med PIN kode

Dit SIM kort er muligvis beskyttet af en fire cifret identifikationskode som kaldes for en PIN kode. Denne kode er beregnet til at beskytte dit SIM kort og dit abonnement mod misbrug.

Hver gang du tænder din MiniVision 2 efter den har været slukket vil du blive bedt om at angive din PIN kode. For at låse dit SIM kort op og tilgå alle funktionerne på din MiniVision 2 skal du angive din PIN kode ved brug af det alfanumeriske tastatur og bekræfte med **OK** tasten.

Så snart din PIN kode er godkendt vil din MiniVision 2 starte op på Hjemmeskærmen.

Godt at vide: Såfremt den PIN kode du angiver ikke er korrekt efter i alt tre forsøg vil dit SIM kort blive blokeret, og du vil herefter være påtvunget til at angive en din otte cifrede PUK kode, som du har fået udleveret af din operatør, for at komme videre derfra.

Godt at vide: Du kan altid ringe til Alarmcentralen (denne tjeneste udbydes ligeledes af din operatør) direkte via Menuen ved indskrivning af PIN kode (tryk på Menu tasten).

Kom godt i gang

Det helt basale om brugergrænsefladen

Brugergrænsefladen på din MiniVision 2 er blevet udviklet med fokus på simplicitet:

- Alle elementer der er visuelt præsenteret på din MiniVisions 2 visuelle skærm er opstillet i listeformat for at sikre en nem navigation, der er lineært opbygget.
- Hver streng af information er præsenteret på én linje.
- Tekststrengene som i længde overskrider skærmens størrelse vil automatisk blive læst, og begynde visuelt at rulle horisontalt, som en lysavis.
- Som standard vil tekst som du ser på skærbilledet være hvid på en sort baggrund.
- Når du benytter **Op** og **Ned** tasterne til at navigere gennem din MiniVisions menu system vil teksten du har fokus i blive præsenteret i omvendte farver - hvilket betyder sort tekst på hvid baggrund.
- Hvert element bliver læst af skærmlæseren
- Når du åbner et nyt skærbillede (aktiverer et element), så vil din MiniVision 2 placere dig på det første element og læse elementet for dig.
- Når du navigerer tilbage til det forrige skærbillede vil du automatisk blive placeret på det seneste valgte element.
- Når du lander øverst eller nederst i en liste vil du høre et lydssignal og annonceringen af det pågældende element.
- For at forsikre dig og bekræfte at en specifik handling er udført vil du i enkelte tilfælde få en annoncering som skærmlæseren vil læse for dig, og som hurtigt præsenteres visuelt i skærbilledet - eksempelvis når en SMS besked er blevet afsendt. For at fjerne denne annoncering / meddelelse skal du blot trykke på en tilfældig tast og fortsætte med at bruge din MiniVision mobiltelefon.

Navigering gennem menuen på din MiniVision 2

Herunder præsenteres du for de forskellige taster der bruges til at navigere gennem din MiniVision 2 mobiltelefons menu system:

Op tasten navigerer til det forrige elementet i den aktuelle liste.

Ned tasten navigerer til det næste element i listen.

Med **OK** tasten bekræfter du handlinger og / eller godkender det element du har navigeret til.

Når du godkender (vælger) et element som du har navigeret til, vil du oftest blive præsenteret for et nyt skærbillede.

Tilbage tasten benyttes til at vende tilbage til det forrige skærbillede (i tilfælde af fejlnavigation, eksempelvis).

Med **Menu** tasten kan du tilgå ekstra funktioner som relaterer sig til menuen som du befinder dig i.

Afbryd opkald tasten vil vende tilbage til Hjemmeskærmen.

Såfremt du allerede befinder dig på Hjemmeskærmen vil du aktivere dvaletilstand i stedet for.

Godt at vide: Trykker og holder du på **Op** tasten vil du springe direkte til det første element i en aktuel liste, og trykker og holder du på **Ned** tasten vil du springe direkte til det nederste element. En beskrivelse af alle tilhørende funktioner til de forskellige taster er at finde i sektionen « [Indeks – Navigationstasterne](#) ».

Juster lydstyrken på din MiniVision 2

Med **Venstre** og **Højre** tasterne kan du åbne lydstyrke kontrolpanelet på din MiniVision 2 mobiltelefon. Du kan justere på tre forskellige lydstyrke områder, som er som følger:

- Stemme (Generelt) - 15 niveauer: Lydstyrke på skærmlæser samt FM Radio.
- Alarm - 7 niveauer: Lydstyrken på alarmerne.
- Ringetone - 7 niveauer: Lydstyrken på indgående opkald.

Så snart du har kontrolpanelet med lydstyrke åbnet skal du benytte **Op** og / eller **Ned** tasterne for at navigere til det pågældende område for lydstyrke som du ønsker at justere. Som standard vil du have fokus i Stemme først. Benyt herved **Venstre** tast til at sænke lydstyrken for det pågældende område, eller **Højre** tast for at øge den.

Kontrolpanelet med mulighed for at justere lydstyrken vil automatisk lukke efter fem sekunders inaktivitet. Du kan dog til enhver tid selv lukke for kontrolpanelet ved at trykke på **OK** tasten eller ved at benytte **Tilbage** tasten.

Godt at vide: Lydstyrken for kommunikation (tale) uafhængig af ovenstående lydstyrke områder. Denne kan du justere direkte under et igangværende opkald ved brug af **Venstre** eller **Højre** tasterne.

Godt at vide: Justerer du Ringetone niveauet helt ned til 0 vil det være det samme som "Lydløs" (vibration og ringetone deaktiveret). MiniVision 2 har også dedikerede genveje til at aktivere lydløs / høj tone (få mere information herom i afsnittet 'Tilgængelighedsgenveje').

Brug af Talekommandoer

Den indbyggede talekommando funktion i din MiniVision 2 giver dig mulighed for at starte forskellige handlinger gennem de prædefinerede nøgleord som allerede er klar til brug.

En velfungerende internet forbindelse er nødvendig for at kunne gøre brug af Talegenkendelsen (Wi-Fi gennem en router eller 3G / 4G gennem dit mobil abonnement). Såfremt du ikke har forbindelse til et netværk eller hvis den aktuelle forbindelse ikke er tilstrækkelig, vil funktionen ikke fungere, og din MiniVision 2 Mobiltelefon vil annoncere: "Ingen dataforbindelse."

For at gøre brug af Talekommando funktionen skal du trykke og holde på **OK** tasten fra Hjemmeskærmen eller fra oversigten over de forskellige funktioner. Så snart du hører et lydsignal skal du roligt og tydeligt sige et af følgende nøgleord:

- « **Ring til** » efterfulgt af navnet på den pågældende kontaktperson - gør det muligt for dig at ringe til en kontaktperson.
Din MiniVision 2 vil præsentere et skærmbillede med den eller de kontaktpersoner som matcher indtalingen. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere gennem listen og tryk på **OK** tasten for at bekræfte den ønskede kontaktperson, hvorved et opkald påbegyndes. Du kan læse mere om opkald ved at gennemgå « **Telefon** » sektionen.
- « **Send besked til** » efterfulgt af navnet på den pågældende kontaktperson - Sender en besked til kontaktpersonen.
Din MiniVision 2 vil præsentere et skærmbillede med den eller de kontaktpersoner som matcher indtalingen. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere gennem listen og tryk på **OK** for at bekræfte den ønskede kontaktperson, hvorved du kan skrive en SMS besked. Indskriv din besked ved brug af det fysiske tastatur eller ved brug af Talegenkendelse og tryk på **OK** for at godkende afsendelsen. Du kan læse mere om beskeder ved at gennemgå « **Beskeder** » sektionen.
- « **Opret ny note** » efterfulgt af selve notens indhold: Giver dig muligheden for at direkte at åbne og starte på oprettelsen af en note med den dikterede tekst indskrevet i en redigeringsboks. Bekræft oprettelsen af din nye note ved at trykke på **OK** tasten. Din MiniVision 2 vil herefter placere dig i Note applikationen. Benyt herefter **Op** og **Ned** for at navigere gennem dine eventuelt andre noter også. For mere information herom, gennemgå venligst « » sektionen.
- « **Ny kontaktperson** »: Sender dig direkte til oprettelse af en ny kontaktperson.
Benyt herefter **Op** og **Ned** tasterne for at navigere gennem listen af redigeringsfelter (Fornavn, Efternavn, Telefonnummer, Type, Note samt Ringetone) og tryk på **OK** tasten på de pågældende redigeringsfelter for at gå i gang med at indskrive. Du kan læse mere om Kontaktpersoner i « **Kontaktpersoner** » sektionen.

- « **Ny alarm** »: Gå straks i gang med at oprette og aktivere en ny alarm.
- Igen skal du benytte **Op** og **Ned** tasterne for at navigere gennem listen af redigeringsfelter (Aktiveret / Deaktiveret, Klokkelæt, Ringetone samt Gentagelse) og benyt **OK** tasten når du finder et felt du ønsker at redigere. Læs mere omkring alarm og oprettelse heraf i sektionen « **Alarm** ».
- « **Ny begivenhed** »: Ved brug af denne Stemmekommando skal du nemt og hurtigt oprette en ny begivenhed.
Benyt **Op** og **Ned** tasterne for at navigere gennem listen af redigeringsfelter (Titel, Dato, Klokkelæt, Gentagelse, Påmindelse samt Ringetone) og benyt **OK** tasten på redigeringsfelter som du ønsker at udfylde, eller felter som du ønsker at justere på. For yderligere information kan du læse mere i « **Planlægning** » sektionen.
- “Ny optagelse”: Du kan nemt lave en lydoptagelse ved brug af denne stemmekommando, som automatisk starter ‘Lydoptager’ funktionen. Læs mere herom i sektionen « **Lydoptager** ».
- « **Telefon** »: Åbner din Telefon funktion.
- « **Kontaktpersoner** »: Åbner din Kontaktperson funktion.
- « **Beskeder** »: Åbner din Beskeder funktion.
- « **Alarm** »: Åbner Alarm funktionen.
- « **Planlægning** »: Åbner for Planlægnings funktionen.
- “Kamera”: Åbner din Kamera funktion.
- “Galleri Åbner dit Galleri med billeder.
- « **FM Radio** »: Åbner funktionen FM Radio.
- “Lysdetektering”: Åbner din Lysdetektering funktion.
- « **Farvetester** »: Åbner din Farvetester funktion.
- « **Genkend Pengesedler** »: Åbner din Genkend Pengesedler funktion.
- « **Lommeregner** »: Åbner for Lommeregneren.
- « **Lydoptager** »: Starter Lydoptager applikationen.
- « **Noter** »: Placerer dig i Noter funktionen.
- « **Lommelygte** »: Benyt denne for at åbne Lommelygte funktionen (og lommelygten tænder automatisk).
- « **Vejr** »: Åbner Vejr funktionen og præsenterer vejret for dig, der hvor du befinder dig.
- « **SOS** »: Åbner for SOS funktionen (skal siges som et ord, og ikke som tre bogstaver).
- « **Indstillinger** »: Sender dig direkte til Indstillinger funktionen.
- « **Nøgleord** »: Vil give dig en annoncering af de nøgleord som du kan benytte.

Her følger lidt anbefalinger som du skal forholde dig til ved brug af Stemmekommandoer:

- Vær tålmodig og vent til lydsignalet er afsluttet helt, før du begynder på din Stemmekommando.
- Talegenkendelsen skal udføres i et stille miljø, hvilket vil give det bedste resultat.
- For **Ring til** samt **Send besked til** en given kontaktperson er det underordnet om du siger fornavn og / eller efternavn, men du kan med fordel sige begge, hvis du har flere kontaktpersoner med samme fornavn.

Skriv med det fysiske tastatur

Når din MiniVision 2 mobiltelefon annoncerer “Redigeringsfelt” betyder det at du kan indskrive ved brug af det alfanumeriske tastatur.

Det alfanumeriske tastatur (tasterne **1** til **Firkant**) benyttes til at indskrive tekst og tal.

Hver tast på det fysiske tastatur giver adgang til flere forskellige karakterer.

Trykker du på den samme tast gentagende gange og hurtigt vil du kunne cirkulere gennem de forskellige karakterer.

- Tast **1** benyttes til at indsætte tegnsætningstegn og special karakterer (eksempelvis @, &, +, parentes og så videre).

- Tasterne **2** til **9** benyttes til at indsætte alfanumeriske karakterer. Eksempelvis vil tast **2** cirkulere gennem de følgende karakterer: a, b, c, 2, æ, å, A, B, C, Æ, Å.
- Tast **0** kan du benytte til at angive et Mellemrum eller "+" karakteren.
- Du benytter **Stjerne** tasten til at cirkulere mellem de forskellige tastaturtilstande: "Normal tastatur", "Store bogstaver" og "Numerisk".
- Med **Firkant** tasten kan du frembringe en oversigt over symboler, tegnsætninger samt special karakterer. Benyt her **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til den ønskede karakter eller symbol og indsæt ved at bruge **OK** tasten. Tryk på **Firkant** tasten to gange hurtigt efter hinanden for at komme til en oversigt over mulige humørikoner som du kan indsætte. Gør også her brug af **Op** eller **Ned** tasterne til at cirkulere gennem listen tilgængelige humørikoner og angiv en af dem ved brug af **OK** tasten, som derved vil blive indsat i din tekst.

En komplet oversigt over de bagvedliggende karakterer for det alfanumeriske tastatur er at finde under « [Indeks – Navigationstasterne](#) » sektionen.

Når du har indskrevet en tekst kan du benytte følgende:

- **Op** knappen for at få gentaget al tekst som du har indskrevet, positionen af markøren i teksten, den aktuelle navigationstilstand samt information om tegn.
- Benyt **Ned** knappen for at angive navigationstilstand (Tegn eller Ord).
- Venstre og Højre knapper for at flytte på din markør i teksten (Enten Ord for Ord eller Tegn for Tegn alt efter den valgte navigationstilstand).

OK tasten for at bekræfte din indskrivning.

Godt at vide: Trykker og holder du på tasterne **0** til **9** mens du befinder dig i et redigeringsfelt vil du have mulighed for at indsætte det pågældende ciffer direkte, uden at skulle cirkulere gennem de bagvedliggende bogstaver. Eksempelvis: For at indsætte et "2" i et redigeringsfelt skal du trykke i alt fire gange på tast **2** (a, b, c, 2), eller også kan du trykke og holde på tast **2**.

Diktering ved brug af talegenkendelse

Ud over at din MiniVision 2 mobiltelefon er udstyret med talekommandoer, har den også indbygget en talegenkendelses funktion som gør dig i stand til at indsætte tekst i et redigeringsfelt blot ved at gøre brug af din tale.

En velfungerende internet forbindelse er nødvendig for at kunne gøre brug af Talegenkendelsen (Wi-Fi gennem en router eller 3G / 4G gennem dit mobil abonnement). Såfremt du ikke har forbindelse til et netværk eller hvis den aktuelle forbindelse ikke er tilstrækkelig, vil funktionen ikke fungere, og din MiniVision 2 Mobiltelefon vil annoncere: "Ingen dataforbindelse."

For at gøre brug af talegenkendelse skal du trykke og holde på **OK** tasten når du befinder dig i et redigeringsfelt, og efter du hører lydsignalet. Så snart du har hørt lydsignalet skal du tale - tal tydeligt og klart. Talegenkendelsen stopper så snart du holder op med at tale (eksempelvis også hvis du holder en længere pause). Efter et par sekunder vil talen blive konverteret til tekst, som automatisk indsættes i redigeringsfeltet og læses for dig. Ønsker du at udføre rettelser i teksten kan du gøre brug af det fysiske tastatur som tidligere beskrevet.

Her følger lidt anbefalinger som du skal forholde dig til ved brug af talegenkendelses funktionen:

- Vent altid til lydsignalet er stoppet, før du påbegynder indtalingen.
- Talegenkendelsen skal udføres i et stille miljø, hvilket vil give det bedste resultat.
- Du kan gøre brug af talegenkendelse så meget du har lyst til, mens du befinder dig i redigeringsfeltet, og funktionen vil sammenfatte resultatet automatisk.

- Du kan selv tilføje specifikke tegnsætninger - (“,” “?” “!” og så videre) - mens du taler, ved at sige navnet på karakteren. Eksempelvis: "Skal vi spise sammen på søndag spørgsmålstejn".
- Talegenkendelsen vil herved undersøge konteksten i sætningen. Det vil derfor også være mere relevant at benytte det til lange sætninger, end til mindre grupper med ord.

Slet en tekst

I et redigeringsfelt kan du benytte **Tilbage** tasten til at slette den senest angivne karakter. Du har også mulighed for at slette al tekst ved at trykke og holde **Tilbage** tasten.

Rediger en tekst

Når du befinder dig i et redigeringsfelt kan du benytte tasterne **Venstre** og **Højre** for at flytte markøren og herved slette og / eller tilføje en karakter, et ord, afsnit og så videre.

Ned knappen giver dig mulighed for at indstille navigationstilstanden - du kan vælge mellem Tegn og Ord.

Venstre tast flytter markøren til venstre i et redigeringsfelt. Og **Højre** tast flytter så markøren til højre.

Trykker og holder du på **Venstre** eller **Højre** knapperne flytter din markør henholdsvis til starten eller til slutningen af din tekst.

Godt at vide: Du har ikke mulighed for at justere på lydstyrken på din MiniVision 2 mens du redigerer tekst, simpelt fordi tasterne **Venstre** samt **Højre** her bliver benyttet til redigeringsfunktioner.

Menu for redigeringsfelt

Når du har et redigeringsfelt i skærbilledet kan du trykke på **Menu** tasten for at få adgang til følgende elementer:

- Gem: Gem ændringer foretaget i redigeringsfeltet.
- Afbryd: Annuller redigeringen og fortryd indtastning.
- Slet alle: Slet al tekst der befinder sig i redigeringsfeltet.
- Kopier alt: Kopier alt tekst til udklipsholderen.
- Klip alt: Kopierer først hele teksten hvorefter teksten automatisk fjernes, og placeres i udklipsholderen.
- Indsæt alt: Indsæt indholdet af udklipsholderen ind i redigeringsfeltet.

Genveje for redigeringsfelt

Når du befinder dig i et redigeringsfelt kan du benytte forskellige tastaturgenveje til at flytte en markør, markere, kopiere, klippet samt indsætte en tekst.

For at gøre dette skal du trykke og holde **Stjerne** tasten samtidigt med en anden tast på det fysiske tastatur, for at udføre den ønskede handling. Herunder følger en liste over tilgængelige handlinger:

- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **Venstre** tast: Markerer karakteren til venstre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit).
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **Højre** tast: Markerer karakteren til højre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit).
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **0** tast: Markerer indholdet af redigeringsfeltet.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **3** tast: Klipper den markerede tekst til udklipsholder.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **6** tast: Kopierer den markerede tekst til udklipsholder.

- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **9** tast: Indsætter teksten fra udklipsholderen.

Tilgængelighedsgenveje

De følgende genveje giver dig adgang til nemt og hurtigt at justere på tilgængeligheden ved at du blandt andet kan åbne menuen, justere på læsehastighed samt gentage eller stave seneste elementer. Tilgængelighedsgenvejene fungerer overalt på din MiniVision 2 mobiltelefon.

For at gøre brug af en af genvejene til tilgængeligheden skal du trykke og holde **Firkant** tasten sammen med en anden tast på det fysiske tastatur, samtidigt. Herunder følger en oversigt over genvejene:

- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **0** tast: Åbner Indstillinger.
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **1** tast: Giver dig status for din MiniVision (Klokkeslæt, batteriniveau, Wi-Fi status, Bluetooth status, netværk status).
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **2** tast: Annoncerer alle elementer i den aktuelle liste, en efter en, fra toppen.
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **4** tast: Nedsætter hastigheden på skærmlæseren.
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og hurtigt tryk på **5** tast: Øger hastigheden på skærmlæseren.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **7** tast: Gentager den seneste annoncering.
- Tryk og hold på **Stjerne** tasten og tryk hurtigt på **8** tast: Staver den seneste annoncering (karakter for karakter).
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og tryk hurtigt på **Venstre** tast: Aktiverer Lydløs (Ringetone indstilles til det laveste, 0 ud af 7).
- Tryk og hold på **Firkant** tasten og tryk hurtigt på **Højre** tast: Aktiverer Udendørs (Ringetone indstilles til det højeste, 7 ud af 7).

Hjemmeskærmen og Oversigt over Funktioner

Hjemmeskærmen

Hjemmeskærmen er det samme som hovedskærmen på din MiniVision 2 mobiltelefon. På Hjemmeskærmen kan du hurtigt få annonceret aktuelle klokkeslæt, antallet af ulæste beskeder samt ubesvaret opkald.

Trykker du på **Afbryd opkald** tasten vil du komme ud på Hjemmeskærmen, såfremt din MiniVision mobiltelefon er tændt. Du har altid mulighed for at komme tilbage til Hjemmeskærmen. Dette kan være brugbart hvis du pludselig fare vild i menuen i din MiniVision.

Godt at vide: Når du befinder dig ude på Hjemmeskærmen kan du herfra direkte begynde at indskrive et telefonnummer som du ønsker at ringe til, eller gøre brug af "**Hurtig Start**" funktionen. Denne funktion er beskrevet nærmere i sektionen « **Tastaturet** » i denne brugervejledning, og handler om at du kan starte en applikation / funktion eller ringe til en specifik kontaktperson hurtigt ved at trykke og holde en af 2 - 9 tasterne.

For at tilgå en liste over MiniVisions funktioner skal du benytte én af følgende taster: **Op**, **Ned** eller **OK**.

Oversigt over Funktioner

Når du forlader Hjemmeskærmen som beskrevet tidligere, vil du blive præsenteret for en liste over funktioner, som din MiniVision er udstyret med. På din MiniVision 2 finder du i alt 18 funktioner:

- **Telefon**
- **Kontaktpersoner**
- **Beskeder**
- **Alarm**
- **Planlægning**
- **Kamera**
- **Galleri**
- **Kamera**
- **Med Kamera** applikationen kan du tage billeder ved brug af det indbyggede kamera som er placeret på bagsiden af din MiniVision 2.

Tag et billede

Så snart du starter Kamera applikationen vil billedet fra kameraet blive vist i skærbilledet. Du vil også høre et lydssignal hvert tredje sekund som fortæller dig at kameraet er aktiveret. Peg nu kameraet mod objektet eller begivenheden som du ønsker at tage et billede af og tryk på OK knappen når du ønsker at tage billedet. Et karakteristisk lydssignal vil blive afspillet når billedet tages.

Billedet bliver automatisk gemt i den interne hukommelse i din MiniVision 2, og via en computer kan det findes i "DCIM" mappen. Du kan også gennemse billedet, og alle dine andre billeder, i "Galleri" applikationen.

Godt at vide: Med Menu knappen, når du befinder dig i Kamera applikationen, kan du komme direkte til din "Galleri" applikationen.

Godt at vide: Lydsignalet som du hører hvert tredje sekund kan godt deaktiveres ved at deaktivere elementet "Giv lydssignal når kamera eller LED er aktiveret" som du finder under Indstillinger og "Skærmlæser".

Galleri

I Galleri applikationen kan du gennemse de billeder som du har taget med din MiniVision 2, eller de billeder som du har modtaget via MMS, og som du har gemt.

Hvert billedet som du har i dit galleri vil blive annonceret med følgende information: Titel på billedet samt Dato for billedet (dag / måned / år / time (timer) / minut (minutter) / sekund (sekunder)).

Som standard vil billeder som du tager med din MiniVision 2 mobiltelefon ikke have en titel. **Dine billeder vil blive sorteret i kronologisk rækkefølge, fra seneste til ældste.**

Se et billede

Når du starter din Galleri applikation vil det seneste billede du har taget blive vist i skærmbilledet. Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder som findes i din MiniVision 2.

Når du ser på et billede har du følgende muligheder:

Knap **1**: Zoom Ud (8 niveauer er tilgængelige)

Knap **3**: Zoom Ind (8 niveauer er tilgængelige)

Knap **2**: Flyt Op

Knap **4**: Flyt Ned

Knap **6**: Flyt Højre

Knap **8**: Flyt Ned

Godt at vide: Zoom niveauet nulstilles hver kan du skifter billede ved brug af **Op** eller **Ned**.

Søg efter billede ud fra dato

Du har mulighed for at søge efter et billede ud fra datoen det er taget ved at trykke på Menu knappen, navigere til og vælge "Søg" med Op eller Ned og bekræfte med OK knappen. Din MiniVision 2 tilbyder dig at søge efter et billede som befinder sig i den interne hukommelse og med relation til datoen. Benyt Op og Ned knapperne igen for at angive en søgedato sorterede ud fra måned og brug OK knappen til at bekræfte. MiniVision 2 vil nu præsentere billeder der er taget ud fra dato.

Omdøb et billede

Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som du ønsker at omdøbe, og tryk nu på **OK** knappen for at tilgå muligheder for det specifikke billede. Brug igen **Op** og **Ned** i listen over elementer til du lander på "Omdøb", brug **OK** knappen til at bekræfte. Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv det nye navn ved brug af det fysiske, alfanumeriske tastatur eller ved brug af talegenkendelse, og bekræft din nye titel på billedet med **OK** knappen. Din MiniVision 2 beder dig bekræfte om du ønsker billedet skal omdøbes.

Send et billede via MMS

Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som du ønsker at dele / sende, og tryk nu på **OK** knappen for at tilgå muligheder for det specifikke billede. Brug igen **Op** og **Ned** i listen over elementer til du lander på "Send", brug **OK** knappen til at bekræfte. Du præsenteres for et nyt skærmbillede som giver dig mulighed for at vælge hvem du ønsker at sende billedet til:

- **Kontakter:** Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en besked til. Brug **Op** og **Ned** for at navigere mellem dine kontaktpersoner og tryk på **OK** knappen for at vælge.
- **Angiv telefonnummer:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en besked til, ciffer for ciffer. Angiv telefonnummeret ved brug af det fysiske tastatur og tryk på **OK** knappen.

Når du har valgt en modtager kan du skrive en besked til, som er valgfrit, og tryk på **OK** knappen for at sende MMS beskeden afsted, med billedet, og du returnerer automatisk til Galleri applikationen.

Billededetaljer

Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som du ønsker at dele / sende, og tryk nu på **OK** knappen for at tilgå muligheder for det specifikke billede. Brug igen **Op** og **Ned** i listen over elementer til du lander på “Detaljer”, brug **OK** knappen til at bekræfte. Du præsenteres for et vindue der indeholder følgende informationer:

- Titel på billedet.
- Dato for billedet.
- Fil: Giver dig billedets placeringen i hukommelsen samt filnavnet på selve billedet.

Tryk på **Tilbage** knappen for at returnere til dine billeder.

Slet et billede

Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som du ønsker at slette, og tryk på **OK** knappen for at tilgå muligheder for det specifikke billede. Brug igen **Op** og **Ned** i listen over elementer til du lander på “Slet”, brug **OK** knappen til at bekræfte. Du bliver bedt om at bekræfte dit ønske. Vælg “Ja” for at bekræfte eller “Nej” for at annullere.

Slet alle billeder

Du kan også slette alle dine billeder ved at trykke på **Menu** knappen når du befinder dig i listen med dine billeder, og vælge elementer “Slet alle”, som du kommer til ved brug af **Op** eller **Ned**, og bekræft med **OK** knappen. Du bliver også her bedt om at bekræfte dit ønske. Vælg “Ja” for at bekræfte at du ønsker at slette samtlige billeder, eller “Nej” for at annullere.

- FM Radio
- **Lysdetektering**
- *Lysdetektering*
-

Med denne applikation kan du få annonceret lysstyrke niveauet med lyssensoren som er placeret på bagsiden af din MiniVision 2.

Hvordan får jeg oplyst lysstyrke niveauet?

Peg med bagsiden af din telefon hen mod et område som du ønsker detekteret. Er området lyst vil din MiniVision 2 enten give et højt lydssignal eller en høj procentdel. Er området mørkt vil din MiniVision 2 enten give et lavt lydssignal eller en lav procentdel.

Du kan ændre på selve notifikationen i indstillingerne ved brug af « Menu » knappen, hvor du kan vælge mellem:

- “Procentdel” som giver dig mængden af lys ved en annoncering af procentdelen.
- “Lydssignal” som er standard og som giver dig en indikation via lyd.

- Farvetester
- **Genkend Pengesedler**
- **Lommeregner**
- **Lydoptager**
- **Noter**
- **Lommelygte**
- **Vejr**
- **SOS**
- **Indstillinger**

Hver funktion vil blive beskrevet i detaljer i de følgende sektioner.

For at navigere til en funktion skal du benytte **Op** og / eller **Ned** tasterne, og for at vælge en funktion benytter du **OK** tasten. For at forlade en funktion kan du altid benytte **Tilbage** tasten. I nogen tilfælde vil du være nødsaget til at benytte **Tilbage** tasten mere end én gang for at komme tilbage til listen over funktioner, hvis du eksempelvis er navigeret længere ind i den pågældende funktion.

Du kan også altid forlade en funktion, dog uden at gemme eventuelle informationer, og derved vende tilbage til Hjemmeskærmen, ved at trykke på **Afbryd opkald** tasten.

Godt at vide: De funktioner som er præinstalleret på din MiniVision 2 og som du præsenteres for i listen kan variere fra land til land, udbyder samt produktkonfigurationen.

Telefon

Telefon funktionen giver dig muligheden for at foretage opkald, gennemgå Voicemail og gennemse din opkalds historik. Du kan tilgå Telefon funktionen til enhver tid ved at trykke på **Besvar opkald** tasten.

Besvar et indgående opkald

Når din MiniVision mobiltelefon ringer skal du blot trykke på **Besvar opkald** tasten for at besvare det. **Besvar Opkald** tasten er placeret til venstre i den øverste del af navigationstastaturet, lige neden under **Menu** tasten. Det er symboliseret med tre vertikale, grønne prikker.

Som standard er "Besvar opkald med knapperne 0 til 9" funktionen aktiveret, hvilket giver dig mulighed for at besvare indgående opkald ved brug af en tilfældig tast i det alfanumeriske tastatur. For mere information herom skal du gennemgå indstillingerne, som du finder i sektionen « **Tastaturet** ».

Godt at vide: Når din MiniVision ringer kan du gøre ringetonen stille og derved høre hvem der ringer ved at trykke på **Venstre** eller **Højre** tast. For at få afsender af opkaldet gentaget, tryk på enten **Op** eller **Ned** tasten.

Afslut et opkald

For at afbryde et igangværende opkald skal du trykke på **Afbryd opkald** tasten, som er den tast der er placeret i højre side af navigationstasterne, lige under **Tilbage** tasten. Det er symboliseret med tre horisontale, røde prikker.

Afvis et indgående opkald

Du kan afvise at besvare et indgående opkald ved at trykke på **Afbryd opkald** tasten inden besvarelse.

Foretag et opkald

Fra Hovedskærmen af Telefon funktionen kan du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til et af følgende muligheder:

- **Ring til kontaktperson:** Giver dig mulighed for at vælge en kontaktperson som du ønsker at ringe til. Benyt igen **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere mellem dine kontaktpersoner du har i listen og påbegynd opkaldet ved at trykke på **OK** tasten.

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Beskeder funktionerne kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at søge efter og indeksere kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtringen sker for både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af **Op** og / eller **Ned** tasterne. For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten. Når du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på **OK** tasten for at påbegynde opkaldet.

- **Ring op:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at ringe til, ciffer for ciffer. Når du præsenteres for redigeringsfeltet kan du indskrive telefonnummeret ved at gøre brug af det alfanumeriske tastatur, og bekræfte og påbegynde opkaldet ved tryk på **OK** eller **Besvar opkald** tasten.

Godt at vide: Du kan også sagtens angive et telefonnummer som du ønsker at ringe til direkte fra Hjemmeskærmen og fra Hovedmenuen i Telefon funktionen. Gør dette ved blot at begynde at indskrive det telefonnummer du ønsker at ringe til, ciffer for ciffer, og påbegynd opkaldet med **OK** eller **Besvar opkald** tasten.

- **Opkaldshistorik:** Her har du mulighed for at ringe tilbage til en kontaktperson eller et telefonnummer som du enten tidligere har ringet til, eller som har forsøgt at få fat på dig. Benyt også her **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til det pågældende nummer eller kontaktperson og tryk på **OK** tasten for at blive præsenteret for en kontekst menu. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Ring op" elementet og tryk på **OK** tasten.
- **Voicemail:** Dette element giver dig hurtig adgang til at ringe til din voicemail og lytte til indtalte beskeder.

Funktioner under igangværende opkald

Under et igangværende opkald kan du trykke på **Menu** tasten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Aktiver højttaler:** Skifter over til at bruge højttaleren i din MiniVision 2 - håndfri tilstand. For at vende tilbage til at bruge den almindelige højttaler, tryk igen på **Menu** og vælg "Deaktiver højttaler" og benyt **OK** for at vælge.

Godt at vide: Et hurtigt tryk på **Besvar opkald** tasten er en hurtig metode til at aktivere og deaktivere højttaleren.

- **Lydløs:** Deaktiverer mikrofonen på din MiniVision 2 så modparten ikke kan høre hvad du siger.
- **Tilføj opkald:** Sætter det igangværende opkald på pause med henblik på at give dig mulighed for at ringe til en anden. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at aktivere den anden kontaktperson i listen og tryk på **OK** tasten for at påbegynde opkaldet til denne.

For at skifte mellem samtaleperson skal du benytte **Menu** tasten og efterfølgende trykke på **Op** eller **Ned** for at finde elementet "Skift opkald" and og bekræft ved tryk på **OK** tasten.

Godt at vide: Under et igangværende dobbelt opkald kan du benytte **Afbryd opkald** tasten til at afslutte det aktuelle opkald, og så vil der automatisk blive skiftet over til den afventende part.

For at sætte begge opkald sammen og derved aktivere konference, tryk da på **Menu** tasten og benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Aktiver Konference" og godkend med **OK** tasten.

Godt at vide: Har du gang i et konference opkald kan du afbryde ved brug af **Afslut opkald** tasten.

Opkaldshistorik

Opkaldshistorikken gør det muligt for dig at gennemse opkald som du har foretaget, modtaget og ubesvaret. Antallet af ubesvaret opkald indikeres på Hjemmeskærmen, og vil også blive annonceret i listen over funktioner, ud fra "Telefon". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan du angive hvorvidt du ønsker at din MiniVision skal annoncere antallet af ubesvarede opkald, når du aktivere den. For mere information herom skal du gennemgå indstillingerne, som du finder i sektionen « [Skærm læser](#) ».

Godt at vide: Antallet af ubesvarede opkald vil automatisk blive fjernet når du har åbnet din Opkaldshistorik.

Fra Hovedskærmen i Telefon funktionen kan du benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på elementet "Opkaldshistorik" og bekræfte med **OK** tasten.

Det er endvidere også muligt at tilgå Opkaldshistorik direkte fra Hjemmeskærmen ved at trykke og holde på **Besvar Opkald** tasten.

Opkald foretaget, modtaget samt ubesvaret vil alle være sorteret efter dato - fra seneste øverst til ældste nederst. Gør brug af **Op** eller **Ned** tasterne her også, for at navigere til kontaktpersonen eller det telefonnummer, hvor du kan trykke på **OK** tasten for derved at få muligheden for at vælge følgende muligheder:

- **Ring op:** Brug dette element til at ringe til kontaktpersonen eller telefonnummeret.
- **Send besked:** Hvis du ønsker at sende en SMS besked til den aktuelle kontaktperson eller telefonnummer.

- **Detaljer:** Herunder finder du detaljer for det specifikke opkald. De efterfølgende elementer præsenteres for dig:
 - **Navn:** Vil annoncere navnet på kontaktpersonen som du ringede til, eller som ringede til dig (Såfremt telefonnummeret ikke er oprettet som en kontaktperson vil du få annonceret telefonnummeret).
 - **Dato:** Angiver den pågældende dato for opkaldet.
 - **Varighed:** Angiver varigheden af opkaldet.
 - **Status:** Lader dig vide typen på opkaldet (Udgående opkald, Indgående opkald eller Ubesvaret opkald).
 - **Telefonnummer:** Som under Navn, blot angives telefonnummeret.
- **Slet:** Fjerner selve opkaldet fra Opkaldshistorikken.
- **Opret:** Med denne mulighed kan du hurtigt oprette en Kontaktperson med det specifikke telefonnummer. Et skærmbillede med trin for oprettelse af ny kontaktperson vil blive præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er udfyldt. Du kan følge vejledningen til at oprette en ny kontaktperson i sektionen « **Opret en ny kontaktperson** ».

Godt at vide: Du har mulighed for at fjerne samtlige telefonnumre og kontaktpersoner fra din Opkaldshistorik ved at trykke på **Menu** tasten, direkte fra "Opkaldshistorik" oversigten, og navigere til elementet "Slet alle", hvor du kan trykke på **OK** tasten for at bekræfte. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette hele Opkaldshistorikken. Naviger til "Ja" med **Op** eller **Ned** tasterne og tryk på **OK** tasten for at bekræfte ønsket.

Godt at vide: Ønsker du kun at få præsenteret ubesvaret opkald skal du trykke på Menu og markere elementet "Vis kun ubesvarede opkald".

Indstillinger

For at få adgang til indstillinger skal du fra Hovedskærmen af Telefon funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du kan benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på elementet "Indstillinger" og tryk på **OK** tasten. Følgende indstillingsmuligheder præsenteres for dig:

- **Vibrere:** Giver dig mulighed for at vælge om din MiniVision mobiltelefon skal vibrere når der kommet et indgående opkald. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Tryk på **OK** tasten for at aktivere vibration.
- **Ringetone ved opkald:** Her kan du angive din ønskede ringetone. Tryk på **OK** for at få mulighed for at ændre på din aktuelle ringetone. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen som du præsenteres for, for at finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par sekunder. Tryk på **OK** tasten når du har fundet den ringetone du ønsker og benyt, og du vender automatisk tilbage til listen over indstillinger.
- **Voicemail nummer:** Angiv her telefonnummeret på din Voicemail. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive det pågældende telefonnummer. Tryk igen på **OK** når nummeret du har angivet skal gemmes. Herefter vil du have mulighed for at ringe direkte til din voicemail (telefonsvarer) ved fra Hjemmeskærm at trykke og holde på tast **1**.
- **Viderestilling:** Her kan du aktivere en automatisk viderestilling af opkald. Som standard vil der ikke være aktiveret en viderestilling. Ønsker du at ændre på indstillingen skal du trykke på **OK** tasten for at tilgå de forskellige muligheder:
 - **Viderestil altid:** Dette element gør, at alle opkald viderestilles til et andet telefonnummer. Tryk på **OK** tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres så for to muligheder:
 - **Status:** Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / Deaktiveret).
 - **Viderestil til nummer:** Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk igen på **OK** tasten for at bekræfte telefonnummeret.
 - **Viderestil ved optaget:** Her vil opkald blive viderestillet til et andet telefonnummer når du allerede har gang i et opkald. Tryk på **OK** tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres så for to muligheder:
 - **Status:** Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / Deaktiveret).
 - **Viderestil til nummer:** Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk igen på **OK** tasten for at bekræfte telefonnummeret.
 - **Viderestil ved ubesvaret:** Her vil opkald blive viderestillet til et andet telefonnummer, såfremt du ikke besvarer det indgående opkald. Tryk på **OK** tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres så for to muligheder:
 - **Status:** Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / Deaktiveret).
 - **Viderestil til nummer:** Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk igen på **OK** tasten for at bekræfte telefonnummeret.
 - **Viderestil når utilgængelig:** Med denne indstilling viderestilles opkaldet til et andet telefonnummer når din MiniVision mobiltelefon er utilgængelig. Tryk på **OK** tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres så for to muligheder:
 - **Status:** Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / Deaktiveret).

- **Viderestil til nummer:** Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på **OK** for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk igen på **OK** tasten for at bekræfte telefonnummeret.
- **Yderligere Indstillinger:**
 - **Opkalds ID:** Giver dig mulighed for at administrere transmitteringen af dit eget telefonnummer når du ringer til andre. Her finder du tre muligheder: "Benyt Netværksstandard", "Skjul nummer" samt "Vis nummer". Som standard vil "Benyt Netværksstandard" være angivet. Du kan trykke på **OK** tasten for at ændre indstillingen. Benyt **Op** eller **Ned** for at vælge en af de andre muligheder og godkend dit valg med **OK** tasten.
 - **Opkald venter:** Denne indstilling vil resultere i at du vil kunne høre et lydssignal hvis du allerede er i gang med at opkald. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Tryk på **OK** tasten for at aktivere indstillingen.

Kontaktpersoner

Funktionen Kontaktpersoner fungerer som en telefonbog hvori alle dine personlige kontakter befinder sig. Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen indeholder alle dine kontaktpersoner som du har gemt på din MiniVision 2 mobiltelefon. Dine kontaktpersoner præsenteres i alfabetisk rækkefølge. Hver enkelt kontaktperson som du har oprettet præsenteres i følgende format: Fornavn, Efternavn, Telefonnummer samt Type.

Importer af Kontaktpersoner

For at undgå udfordringer med kompatibilitet, vil der som standard ikke blive præsenteret kontaktpersoner i funktionen på din MiniVision 2. Såfremt du ønsker det kan du importere kontaktpersoner som du måtte have placeret på dit SIM kort, eller direkte fra en VCF fil.

Dette kan du gøre ved at benytte **Menu** tasten fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen, og derved blive præsenteret for de forskellige muligheder. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Importering", og bekræft med **OK** tasten. Et skærmbillede med følgende elementer vil dukke frem:

- **Importer fra SIM kort:** Her kan du kopiere alle dine kontaktpersoner fra dit SIM kort over på den interne hukommelse i din MiniVision 2. Du vil blive spurgt om du ønsker at importere. Naviger til "Ja" og bekræft med **OK** tasten såfremt du ønsker at fortsætte med importeringen af kontaktpersoner fra dit SIM kort.
- **Importer fra VCF fil:** Med denne funktion kopierer du kontaktpersoner fra en VCF fil direkte til din MiniVisions 2 interne hukommelse. En VCF (også kaldet vCard) fil er baseret på et standardiseret filformat som bruges til at opbevare kontaktinformationer. Det er i langt de fleste tilfælde muligt at generere VCF filer via computere og smartphones med deres kontaktpersons administrationsprogram. For at benytte denne funktion skal du først kopiere VCF filen som indeholder dine kontaktpersoner til et micro SD kort eller overføre den til din MiniVision 2's interne hukommelse. For at oprette en kopi af dine kontaktpersoner på den interne hukommelse af din MiniVision 2, tilslut den til din computer via et USB kabel. MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens hukommelse. Kopier din VCF fil til roden i denne mappe. Så snart du har kopieret filen til din MiniVision 2's interne hukommelse kan du trykke på **OK** tasten på din MiniVision 2 for at påbegynde importeringen af VCF filen. Du bliver præsenteret for et skærmbillede med mulighed for at vælge en fil. Naviger til og vælg navnet på den VCF fil som du har placeret i din MiniVision 2 med **Op** eller **Ned** tasten og bekræft med **OK** for at begynde at importere data fra filen. Du vil blive spurgt om du ønsker at importere. Naviger til og vælg "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget.

Godt at vide: Under importeringsprocessen vil du blive præsenteret for et skærmbillede der løbende informerer dig om status på overførslen. Så snart importeringsprocessen er gennemført vil din MiniVision 2 mobiltelefon annoncere antallet af importerede kontaktpersoner.

Godt at vide: MiniVision 2 understøtter kun ét telefonnummer per kontaktperson. Importerede kontaktpersoner med flere telefonnumre vil blive duplikeret med hver ét telefonnummer, og fordelt på flere forskellige typer (Mobil, Arbejde, Hjem samt Andet).

Opret en ny kontaktperson

Fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen skal du trykke på **Menu** og vælge elementet "Ny kontaktperson", som du navigerer til ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne, og vælger med **OK** tasten.

Du bliver nu præsenteret for et skærmbillede med muligheden for at oprette en ny kontaktperson hvor følgende felter skal udfyldes:

- **Fornavn:** Her angiver du fornavn på kontaktpersonen. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at indskrive navnet. Efter du har indskrevet navnet, tryk da på **OK** tasten igen for at gemme fornavnet og vende tilbage til de andre felter.
- **Efternavn:** Her indskrives efternavnet. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at indskrive navnet. Tryk på **OK** tasten når du har fået indskrevet efternavnet, for at vende tilbage til de andre felter.
- **Telefonnummer:** Og så skal der angives et telefonnummer. Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk på **OK** tasten når du har fået indskrevet telefonnummeret, for at vende tilbage til de andre felter.

Godt at vide: MiniVision 2 understøtter kun ét telefonnummer per kontaktperson. Såfremt du har en kontaktperson som har to telefonnumre vil du være nødsaget til at oprette den samme kontaktperson to gange, udfylde "Fornavn" samt "Efternavn" og indskrive det andet "Telefonnummer" og angive en anden "Type".

- **Type:** Her kan du angive hvilken type telefonnummeret skal arkiveres som. Fire forskellige typer kan du vælge i mellem: "Mobil", "Arbejde", "Hjem" og "Andet". Som standard vil "Mobil" være valgt. Du kan ændre typen ved brug af **OK** tasten og ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre typer, og godkend ved brug af **OK** tasten.
- **Note:** Tilføj en note til / om den pågældende kontaktperson. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at tilføje tekst til note feltet. Tryk på **OK** tasten når du har fået tilføjet og / eller redigeret noten for at vende tilbage til de andre felter.
- **Ringetone:** Herunder kan du angive en specifik ringetone for den pågældende kontaktperson. Tryk på **OK** tasten for at ændre ringetonen. Benyt nu **Op** eller **Ned** tasterne i listen over ringetonerne som du kan vælge i mellem - de enkelte ringetoner afspiller automatisk i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Ringetonen gemmes for den specifikke kontaktperson og du placeres automatisk tilbage ved de andre felter.

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne ringetoner til din MiniVision 2 mobiltelefon. Tilslut din MiniVision 2 til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens hukommelse. Kopier dine MP3 ringetoner / lydfile til mappen "Ringtones" (engelsk ord for "Ringetoner"). Du vil herefter kunne få adgang til at bruge dine egne lyd- og ringetoner i listen over tilgængelige ringetoner - filnavnet vil være det samme som på din computer.

Så snart du har udfyldt de forskellige felter skal du trykke på **Menu** tasten for at få adgang til kontekst menuen. Benyt nu **Op** eller **Ned** tasterne for at finde "Gem" elementet og bekræft ved brug af **OK**.

Godt at vide: Du kan også benytte **Tilbage** tasten som også vil gemme din nye kontaktperson, såfremt blot ét felt er udfyldt.

Godt at vide: Alle kontakter gemmes på din telefons interne hukommelse - det er ikke muligt at gemme dem på SIM kort.

Rediger kontaktperson

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at redigere, og vælger med **OK** tasten. Kontaktpersonen vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til det felt du ønsker at redigere - felterne er som følger: "Fornavn", "Efternavn", "Nummer", "Type", "Note" og "Ringetone". Følg samme procedure som beskrevet under « **Opret en ny kontaktperson** ».

Efter du har redigeret kontaktpersonen, tryk på **Menu** tasten for at komme til flere muligheder. Benyt nu **Op** eller **Ned** tasterne for at finde "Gem" elementet og bekræft ved brug af **OK**.

Godt at vide: Du kan også benytte **Tilbage** tasten som også her vil gemme kontaktperson, såfremt blot ét felt er blevet redigeret.

For at annullere ændringer du har foretaget for en kontaktperson, og inden du har gemt ændringerne, benyt da **Menu** tasten for at åbne kontekst menuen, efterfulgt af **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til "Afbryd". Vælg elementet ved at trykke på **OK** tasten.

Fjern en kontaktperson

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at slette, og vælger med **OK** tasten. Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk nu på **Menu** tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt **Op** eller **Ned** tasten til du lander på elementet "Slet" som du kan vælge med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette kontaktpersonen. Naviger til elementet "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget. Alternativt skal du navigere til "Nej" og benytte **OK** tasten for at annullere sletningen, såfremt du fortryder.

Slet alle kontaktpersoner

For at få mulighed for at slette samtlige kontaktpersoner som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtlige kontaktpersoner. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at bekræfte valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Søg efter en kontakt

Når du befinder dig i listen over dine kontaktpersoner kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at søge efter en eller flere kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtringen sker ud fra bogstavet / tegnet for både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af **Op** og / eller **Ned** tasterne.

For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten. Når du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på **OK** tasten hvorefter du bliver præsenteret for detaljer for den pågældende kontaktperson.

Ring til kontaktperson

For at ringe til en af dine kontaktpersoner anbefales det at gøre brug af « **Telefon** » funktionen. Du kan dog sagtens ringe til en af dine kontaktpersoner direkte fra Kontaktpersoner.

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at ringe til, og vælger med **OK** tasten.

Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringsstilstand. Tryk nu på **Menu** tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt **Op** eller **Ned** tasten til du lander på elementet "Ring op", som du kan vælge med **OK** tasten. Når opkaldet er færdigt skal du blot trykke på **Afbryd opkald** tasten for at afslutte opkaldet og du vender automatisk tilbage til "Kontaktpersoner" funktionen.

Send besked til Kontaktperson

For at sende en SMS besked (tekstbesked) til en af dine kontaktpersoner anbefales det at gøre brug af « **Beskeder** » funktionen. Du har dog også mulighed for at sende en SMS besked direkte til en kontaktpersoner fra "Kontaktpersoner" funktionen.

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at sende en SMS besked til, og vælger med **OK** tasten. Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringsstilstand.

Tryk nu på **Menu** tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt **Op** eller **Ned** tasten til du lander på elementet "Send SMS" som du kan vælge med **OK** tasten. Du bliver nu placeret i Beskeder applikationen og er klar til at skrive beskeden i redigeringsfeltet. Indskriv teksten og tryk på **OK** tasten for at afsende SMS beskeden og herefter vender du automatisk tilbage til "Kontaktpersoner" funktionen.

Del en Kontaktperson ved brug af SMS besked

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den pågældende kontaktperson som du ønsker at dele, og vælger med **OK** tasten. Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringsstilstand. Tryk nu på **Menu** tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt **Op** eller **Ned** tasten til du lander på elementet "Send som SMS til", som du kan vælge med **OK** tasten. Du bliver nu igen præsenteret for listen over dine kontaktpersoner, og her skal du med **Op** eller **Ned** tasterne navigere til den kontaktperson som du ønsker at dele med, og bekræfte med **OK** tasten. Du kommer direkte til "Beskeder" funktionen

hvor en ny SMS besked automatisk bliver oprettet, indeholdende det telefonnummer på den kontaktperson, som du ønsker at dele. Tryk på **OK** tasten for at afsende SMS beskeden og du bliver automatisk placeret tilbage i din liste over kontaktpersoner.

Eksporter dine Kontaktpersoner

Fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen skal du trykke på **Menu** tasten og vælge elementet "Eksporter til VCF", som du navigerer til ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne, og vælger med **OK** tasten. En kopi af dine kontaktpersoner vil nu automatisk blive placeret på din MiniVision 2's interne hukommelse. Denne VCF fil bliver navngivet med navnet 00X.VCF (hvor X er antallet af filer som du allerede har oprettet), og som du kan overføre til din computer.

Beskeder

Beskeder funktionen gør dig i stand til at sende og modtage tekstbeskeder (SMS) samt Multi Media beskeder (MMS), herunder billeder, kontaktpersoner samt længere tekstbeskeder.

I Hovedskærmen af din Beskeder funktion på din MiniVision 2 kan du gennemse alle dine beskeder som du har modtaget og afsendt. Du har mulighed for at vælge imellem to strukturmetoder:

- **Samtaletråd:** Gør at dine beskeder struktureres i grupper af samtaler som du har med modparten, en form for diskussionsforum. Dette betyder at alle de beskeder som du modtager og afsender til samme kontaktperson vil blive grupperet sammen, hvilket kaldes for en tråd. Når du åbner en tråd vil du få adgang til hele historikken med den pågældende kontaktperson.
- **Kronologisk:** Gør at dine beskeder struktureres i kategorier. Denne mulighed gør at dine beskeder, som du sender og modtager, vil blive placeret i specifikke mapper: Indbakke, Sendt, Udbakke samt Kladde. Når du åbner en af mapperne vil du kun blive præsenteret for beskeder der er af samme type, og i kronologisk rækkefølgen eksempelvis vil alle modtaget SMS beskeder være placeret i Indbakken.

Som standard vil Samtaletråd være aktiveret. Du kan ændre denne struktur ved at trykke på **Menu** tasten og herefter benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på elementet "Indstillinger", hvorefter du trykker på **OK** tasten. Når du har åbnet indstillingerne skal du igen benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du finder "Struktur for beskeder" og vælge denne med **OK** tasten. Med **Op** og **Ned** tasten kan du navigere mellem "Samtaletråd" og "Kronologisk" og aktivere den du ønsker med **OK** tasten. I det følgende vil du få beskrevet brugen af Beskeder funktionen, først ved brug af Samtaletråd og efterfølgende ved brug af Kronologisk struktur.

Håndtering af Beskeder under Samtaletråd

Når du ønsker at afsende en SMS besked for første gang vil din MiniVision 2 mobiltelefon helt automatisk oprette en Samtaletråd med den pågældende kontaktperson eller telefonnummer. På samme måde vil en ny Samtaletråd også blive oprettet automatisk første gang du modtager en SMS besked fra en kontaktperson eller telefonnummer. Når du besvarer en modtaget SMS besked fra en kontaktperson vil dit svar blive gemt i Samtaletråden som du har med kontaktpersonen. Som standard vil navnet på Samtaletråden være navnet på den pågældende kontaktperson, såfremt afsender / modtager er oprettet som en kontaktperson, ellers vil navnet blot være det aktuelle telefonnummer. Beskederne sendt og modtaget sorteres i kronologisk rækkefølge - nyeste besked placeres øverst.

Send en ny besked

Fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen skal du trykke på **Menu** og vælge elementet "Ny besked", som du navigerer til ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne, og vælger med **OK** tasten. Du bliver præsenteret for et skærmbillede med mulighed for at vælge en modtager. To muligheder er der at vælge imellem:

- **Kontakter:** Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en besked til. Her skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at finde den kontaktperson du ønsker, og godkende ved brug af **OK** tasten.

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Telefon funktionerne kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at søge efter og indekserer kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtreringen sker for både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af **Op** og / eller **Ned** tasterne. For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten. Så snart du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på **OK** tasten for at vælge.

- **Angiv telefonnummer:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en besked til, ciffer for ciffer. Du præsenteres for et redigeringsfelt hvor du indskrives telefonnummeret ved brug af det alfanumeriske tastatur og du bekræfter ved at trykke på **OK** tasten.

Når du har fået angivet en modtager præsenteres du for at skærmbillede hvorved du kan skrive din SMS besked. Indskriv tekst med det alfanumeriske, fysisk tastatur som din MiniVision er udstyret med, eller gør brug af talegenkendelse, direkte i redigeringsfeltet og tryk på **OK** tasten når du er færdig.

Din MiniVision 2 vil automatisk springe tilbage til selve Hovedskærmen af Beskeder funktionen. Rækkefølgen af dine tråde vil ændre sig så den nyeste altid er placeret øverst.

Send besked til flere modtagere

Ønsker du at afsende den samme SMS besked til flere modtager skal du følge ovenstående vejledning om at oprette en ny SMS besked. Når du præsenteres for redigeringsfeltet hvori du skal skrive SMS beskeden, tryk da på **Menu** tasten for at åbne kontekst menuen. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Tilføj ekstra modtager", og bekræft med **OK** tasten.

Du bliver bedt om at angive om du ønsker den ekstra modtager tilføjet fra din Kontakter liste eller ved at angive telefonnummer - vælg den ønskede metode og kontakt eller telefonnummer og tryk på **OK** knappen.

Tryk på **Tilbage** for at returnere til redigeringsboksen for at tilføje eller fjerne tekst, eller afsende beskeden.

Videresende en besked

Du kan nemt videresende en besked fra en samtaletråd til en anden. Benyt tasterne **Op** og **Ned** når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale som indeholder beskeden du ønsker at videresende, og tryk så på **OK** tasten. Du præsenteres for samtalen og skal nu igen benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den specifikke besked som du ønsker at videresende, og igen trykke på **OK** tasten for at få adgang til de forskellige muligheder du har herom. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Videresend" elementet og tryk på **OK** tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som ved oprettelse af en ny SMS besked skal du angive den kontaktperson som du ønsker skal modtage beskeden, eller også kan du angive telefonnummeret selv. Så snart du har valgt en kontaktperson eller angivet telefonnummer vil du blive præsenteret for et redigeringsfelt med selve beskeden som indhold. Godkend videresendelsen af SMS beskeden med **OK** tasten.

Godt at vide: Du har mulighed for at redigere i teksten før du sender den afsted.

Læs ny besked

Antallet af nye beskeder som du har modtaget på din MiniVision 2 mobiltelefon vil blive indikeret og annonceret på Hjemmeskærmen samt også i din liste over funktioner, når du lander på "Beskeder". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan du angive hvorvidt du ønsker at din MiniVision skal annoncere antallet af nye beskeder, når du aktivere den. Du kan læse mere om denne funktion i sektionen « **Skærmlæser** ».

Når du befinder dig i Beskeder funktionen skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til samtalen som indeholder en eller flere ulæste SMS beskeder. Din MiniVision vil annoncere kontaktpersonen eller telefonnummeret associeret med samtalen, samt også "Ulæst" (og antallet). Tryk på **OK** tasten for at åbne samtalen og gennemse historikken over modtaget og sendte SMS beskeder. Historikken over SMS beskeder sorteres ligeledes i kronologisk rækkefølge, således at det første element i listen er den senest modtaget eller afsendte besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere i samtalen. Modtaget og afsendte beskeder præsenteres i følgende format: Status (Afsendt, Læst eller Ulæst), Dato, Tidspunkt, indholdet af beskeden samt vedhæftede filer som MMS.

Godt at vide: Annoncering og notifikationen af en ny besked forsvinder når du har valgt beskeden (status ændre sig fra "Ulæst" til "Læst").

Præsenter teksten fra beskeden

Med MiniVision 2 får du mulighed for at få præsenteret beskedens tekst i en større skriftstørrelse og en nem metode til at navigere i teksten, enten ved Ord for Ord eller Tegn for Tegn. Du kan tilgå denne funktion ved at navigere til og vælge en besked, trykke på OK knappen for at få adgang til tilgængelige muligheder og handlinger. Benyt Ned knappen for at navigere til og vælge "Præsenter" elementet og bekræft ved tryk på OK knappen. Indholdet af beskeden bliver nu præsenteret i toppen af skærbilledet i en større skriftstørrelse, og i nederste del af skærbilledet ser du ordet som er placeret lige før din markør. Når du befinder dig i denne tilstand kan du gøre følgende:

- **Med Ned knappen:** Skrift navigationstilstanden fra Ord til Tegn og fra Tegn til Ord. Som standard er navigationstilstanden indstillet til Ord.
- **Med Op knappen:** Læs hele beskeden og annoncer den aktuelle position for din markør samt den aktuelle navigationstilstand.
- **Med hurtigt tryk på enten Venstre eller Højre knap:** Flytter din markør henholdsvis til venstre eller til højre, enten ord for ord eller tegn for tegn, alt efter den aktuelle navigationstilstand.

- **Med tryk og hold på enten Venstre eller Højre knap:** Flytter din markør henholdsvis enten helt til begyndelsen af teksten eller til slutningen af teksten.
- **Tilbage knappen:** Forlader "Præsenter" tilstanden.
- **Menu knappen:** Åbner op en menu hvor du kan vælge "Annuller" eller "Kopier alt".

Se vedhæftede fil sendt via MMS

Din MiniVision 2 har mulighed for at modtage vedhæftede filer i en besked (Billeder og Kontaktpersoner). Du vil få annonceret antallet af vedhæftede filer. Andre vedhæftede filer såsom videoer, tekstfiler og lignende vil blive lagret på din MiniVision 2's interne hukommelse.

Benyt **Op** eller **Ned** knapperne for at navigere til en besked som har en eller flere vedhæftede filer og tryk på **OK** knappen for at åbne beskeden. I menuen kan du vælge "Vedhæftede".

Specifikt for billeder: Din MiniVision 2 vil præsentere billedet direkte i skærbilledet. Du kan vælge at gemme billedet ved at trykke på OK knappen og vælge "Gem" elementet. Billedet vil blive gemt automatisk i den interne hukommelse i din MiniVision 2 og du kan finde det igen i Galleri applikationen.

Specifikt for Kontaktpersoner VCF: Din MiniVision 2 vil automatisk foreslå at importere kontakten / kontakterne direkte til din liste over Kontaktpersoner. Vælg "Ja" for at bekræfte.

Specifikt for andet: Når du modtager en vedhæftet fil som er i et format der ikke understøttes af din MiniVision 2, vil du stadig have mulighed for at gemme det på den interne hukommelse. Vælg "Ja" for at bekræfte at du ønsker at gemme filen, og den lagres automatisk i en mappe der hedder Download.

Godt at vide: Indeholder beskeden flere vedhæftede filer vil du få præsenteret en liste. Benyt **Op** eller **Ned** knapperne for at navigere i mellem dem og tryk på **OK** for at åbne eller udføre den bagvedliggende handling.

Besvar en besked

Benyt tasterne **Op** og **Ned** når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale som du ønsker besvare, og tryk så på **OK** tasten for at bekræfte.

Nu præsenteres du for historikken og din MiniVision 2 placerer dig automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Besvar" elementet og tryk på **OK** tasten.

Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv den ønskede tekst med det fysiske tastatur, eller gør brug af talegenkendelse, og bekræft afsendelsen af beskeden ved at trykke på **OK** tasten.

Herefter vil din MiniVision 2 automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen med fokus på samtalen som du netop har tilføjet en besked til. Da den afsendte besked nu er den seneste, vil samtalen blive præsenteret øverst.

Slet en besked fra en samtaletråd

Benyt tasterne **Op** og **Ned** når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale som indeholder den besked du ønsker at slette, og tryk så på **OK** tasten for at bekræfte.

Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision 2, og du placeres automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den specifikke besked som du ønsker at slette, og tryk på **OK** tasten for at få adgang til de forskellige muligheder du har. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Slet" elementet og tryk på **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette beskeden. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen. MiniVision 2 springer automatisk tilbage til samtalelisten.

Slet en samtaletråd

Benyt tasterne **Op** og **Ned** når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale som du ønsker at slette, og tryk så på **OK** tasten for at bekræfte. Tryk på **Menu** tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den specifikke samtale. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Slet denne tråd" elementet og tryk på **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende valget. Så snart handlingen er udført vil din MiniVision 2 springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Slet alle samtaletråde

For at få mulighed for at slette samtlige samtaletråde som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende ønsket om at slette samtlige samtaler. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer

Modtager du en SMS besked fra et ukendt nummer, vil du have mulighed for at tilføje det direkte til din liste over kontaktpersoner, direkte gennem Beskeder funktionen. Benyt din **Op** eller **Ned** tast fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen for at navigere til samtalen med det ukendte telefonnummer.

Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision 2, og du placeres automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Tilføj til Kontaktpersoner", og bekræft med **OK** tasten. Et skærmbillede med trin for oprettelse af ny kontaktperson vil blive præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er udfyldt. Følg herefter vejledningen fra sektionen « **Opret en ny kontaktperson** » til at udfylde resten af felterne.

Ring til en afsender

Det anbefales altid at gøre brug af « **Telefon** » funktionen på din MiniVision, når du skal foretage et opkald. Du kan dog også foretage opkald direkte fra Beskeder funktionen.

Fra Hovedskærmen af din Beskeder funktion skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den samtale du har med den kontaktperson - eller det telefonnummer - som du ønsker at ringe til.

Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision 2, og du placeres automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Ring op" elementet, og tryk på **OK** tasten.

Indstillinger

For at tilgå indstillinger for din Beskeder funktion skal du benytte **Menu** tasten, hvorefter du trykker på **Op** eller **Ned** for at navigere til "Indstillinger", og tryk på **OK** tasten for at godkende. Du præsenteres nu for dine indstillingsmuligheder. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at vælge et af følgende elementer.

- **Struktur for beskeder:** Giver dig mulighed for at angive hvorvidt du ønsker strukturen af dine SMS beskeder i Samtaletråd eller Kronologisk tilstand. Som standard vil Samtaletråd være aktiveret. Se mere under introduktionen under « **Beskeder** ».
- **Leveringsrapport:** Med denne indstilling ændrer du status fra "Meddelelse sendt" til "Meddelelse modtaget", når modparten har modtaget din SMS besked. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Du kan trykke på **OK** tasten for at aktivere indstillingen.
- **Notifikation:** Herunder kan du angive hvilken form for notifikation du ønsker når du modtager en ny SMS besked. Du har to muligheder:
 - **Tilstand:** Tilstand elementet giver dig adgang til at vælge mellem forskellige notifikationsmetoder. Fire forskellige tilstande kan du vælge i mellem: "Ingen", "Vibrere", "Lyd", "Lyd + Vibrere". Som standard vil "Lyd" være aktiveret. Du kan ændre tilstand ved brug af **OK** tasten og ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af **OK** tasten.
 - **Lyd:** Her kan du angive hvilken notifikationslyd du ønsker ved modtagelse af ny SMS besked. Som standard vil lyden med navnet "Adara" være angivet. Tryk på **OK** for at få mulighed for at ændre på din aktuelle lydtone. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere i listen over tilgængelige lyde. Når du navigerer i listen vil din MiniVision afspille lyden som du lander på, bare i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Notifikationslyden gemmes og du placeres automatisk tilbage ved de andre felter.
 - **Afsender notifikation:** Giver dig en annoncering i form af en notifikation af navnet på afsender af en besked, når denne modtages. Når denne mulighed er aktiveret vil

din MiniVision 2 annoncere navnet på kontaktpersonen som har sendt beskeden til dig, eller telefonnummeret såfremt nummeret ikke eksisterer i din liste over Kontaktpersoner.

Godt at vide: Du kan tilføje dine egne notifikationslyde til brug ved modtagelse af nye SMS beskeder på din MiniVision 2. For at gøre dette skal du tilslutte din MiniVision 2 til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" mappen og naviger til og vælg "Internt lager". Kopier dine MP3 lydfile til mappen "Notifications" (engelsk ord for "Notifikationer"). De nye notifikationslydfile vil herefter være at finde i listen over lyde, og navnet i listen vil være titlen på selve MP3 lydfile.

- **SMS servicecenter:** Giver dig mulighed for at angive et værtsnummer for modtagelse eller afsendelse af SMS beskeder. Som standard vil dette nummer være prædefineret automatisk af din udbyder, når dit SIM kort indsættes i din MiniVision 2. Tryk på **OK** tasten såfremt du ønsker at redigere det angivne nummer.
- **Reset APN:** Nulstil dit Access Point Names (APN) som benyttes til at tilgå internettet og modtage MMS beskeder via dit SIM kort.

Håndtering af Beskeder under Kronologisk

Med den Kronologisk struktur vil dine beskeder blive sorteret ud i 4 mapper:

- **Indbakke:** Herunder finder du beskeder som dine kontaktpersoner eller telefonnumre har sendt til dig.
- **Sendt:** I denne finder du de beskeder som du har afsendt.
- **Udbakke:** Udbakken indeholder beskeder som ikke er blevet afsendt (eksempelvis grundet mangel på mobildækning eller forkert telefonnummer).
- **Kladde:** Indeholder de beskeder som du er påbegyndt, men som du ikke har afsendt endnu.

Som standard vil du i Hovedskærmen af Beskeder funktionen blive præsenteret for beskeder som du har modtaget.

For at komme til en af de andre mapper skal du trykke på **Menu** knappen og benytte **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på mappen som du ønsker at tilgå, og vælge med **OK**.

I hver mappe er beskederne sorteret i kronologisk rækkefølge - nyeste besked er placeret øverst. Hver besked præsenteres i følgende format: Status (Afsendt, Læst, Ulæst, Kladde eller Sender meddelelse), Kontaktperson (eller Telefonnummeret), Dato, Tidspunkt efterfulgt af indholdet af beskeden.

Send en ny besked

Fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen samt fra enhver tilfældig mappe skal du trykke på Menu tasten, hvorefter du skal finde elementet "Ny besked" med tasterne **Op** eller **Ned** og bekræfte med **OK**. Du bliver præsenteret for et skærmbillede med mulighed for at vælge en modtager. To muligheder er der at vælge imellem:

- **Kontakter:** Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en besked til. Her skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at finde den kontaktperson du ønsker, og godkende ved brug af **OK** tasten.

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Telefon funktionerne kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at søge efter og indekserer kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtringen sker for både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af **Op** og / eller **Ned** tasterne. For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten. Så snart du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på **OK** tasten for at vælge.

- **Angiv telefonnummer:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en besked til, ciffer for ciffer. Du præsenteres for et redigeringsfelt hvor du indskrives

telefonnummeret ved brug af det alfanumeriske tastatur og du bekræfter ved at trykke på **OK** tasten.

Når du har fået angivet en modtager præsenteres du for at skærbillede med et redigeringsfelt hvori du kan skrive din SMS besked. Indskriv tekst med det alfanumeriske, fysisk tastatur som din MiniVision er udstyret med, eller gør brug af talegenkendelse, direkte i redigeringsfeltet, og tryk på **OK** tasten når du er færdig.

Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Send besked til flere modtagere

Ønsker du at afsende den samme SMS besked til flere modtager skal du følge ovenstående vejledning om at oprette en ny SMS besked. Når du præsenteres for redigeringsfeltet hvori du skal skrive SMS beskeden, tryk da på **Menu** tasten for at åbne kontekst menuen. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Tilføj ekstra modtager", og bekræft med **OK** tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som beskrevet tidligere skal du blot angive en kontaktperson eller selv tilføje det telefonnummer, som du ønsker også skal modtage SMS beskeden. Herefter vil du komme tilbage til redigeringsfeltet og du kan nu indskrive tekst.

Gentag ovenstående vejledning hvis du ønsker at tilføje flere kontaktpersoner og / eller telefonnumre, eller skriv din tekst (ved brug af det alfanumeriske tastatur eller talegenkendelse). Godkend og afsend din SMS besked med **OK** tasten. Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Videresende en besked

Du kan nemt videresende en besked til en af dine Kontaktpersoner. Benyt tasterne **Op** eller **Ned** når du befinder dig i listen over dine forskellige beskedmapper, for at navigere til mappen som indeholder beskeder du ønsker at videresende, og tryk på **OK** tasten. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den specifikke besked som du ønsker at videresende, og tryk på **OK** tasten for at få adgang til de forskellige muligheder du har. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Videresend" elementet og tryk på **OK** tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som ved oprettelse af en ny SMS besked skal du angive den kontaktperson som du ønsker skal modtage beskeden, eller også kan du angive telefonnummeret selv. Så snart du har valgt en kontaktperson eller angivet telefonnummer vil du blive præsenteret for et redigeringsfelt med selve beskeden som indhold. Godkend videresendelsen af SMS beskeden med **OK** tasten. Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Godt at vide: Du har mulighed for at redigere i teksten før du sender den afsted.

Læs en modtaget besked

Antallet af nye beskeder som du har modtaget på din MiniVision 2 mobiltelefon vil blive indikeret og annonceret på Hjemmeskærmen samt også i din liste over funktioner, når du lander på "Beskeder". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan du angive hvorvidt du ønsker at din MiniVision skal annoncere antallet af nye beskeder, når du aktivere den. For yderligere information herom, se venligst under sektionen « **Skærm læser** » som du finder i "Indstillinger".

Som standard præsenteres du for listen over nye beskeder når du åbner Beskeder funktionen. Benyt her **Op** eller **Ned** til at navigere gennem historikken og vælg en ulæst besked. Nye beskeder er sorteret i kronologisk rækkefølge - nyeste besked er placeret øverst.

Godt at vide: Annonceringen af ny besked vil forsvinde når du har valgt beskeden (hvilket betyder at status ændre sig fra "Ulæst" til "Læst").

Præsenter teksten fra beskeden

Med MiniVision 2 får du mulighed for at få præsenteret beskedens tekst i en større skriftstørrelse og en nem metode til at navigere i teksten, enten ved Ord for Ord eller Tegn for Tegn. Du kan tilgå denne funktion ved at navigere til og vælge en besked, trykke på OK knappen for at få adgang til tilgængelige muligheder og handlinger. Benyt Ned knappen for at navigere til og vælge "Præsenter" elementet og bekræft ved tryk på OK knappen. Indholdet af beskeden bliver nu præsenteret i toppen af skærbilledet i en større skriftstørrelse, og i nederste del af skærbilledet ser du ordet som er placeret lige før din markør. Når du befinder dig i denne tilstand kan du gøre følgende:

- **Med Ned knappen:** Skrift navigationstilstanden fra Ord til Tegn og fra Tegn til Ord. Som standard er navigationstilstanden indstillet til Ord.
- **Med Op knappen:** Læs hele beskeden og annoncer den aktuelle position for din markør samt den aktuelle navigationstilstand.
- **Med hurtigt tryk på enten Venstre eller Højre knap:** Flytter din markør henholdsvis til venstre eller til højre, enten ord for ord eller tegn for tegn, alt efter den aktuelle navigationstilstand.
- **Med tryk og hold på enten Venstre eller Højre knap:** Flytter din markør henholdsvis enten helt til begyndelsen af teksten eller til slutningen af teksten.
- **Tilbage knappen:** Forlader "Præsenter" tilstanden.
- **Menu knappen:** Åbner op en menu hvor du kan vælge "Annuller" eller "Kopier alt".

Se vedhæftede fil sendt via MMS

Din MiniVision 2 har mulighed for at modtage vedhæftede filer i en besked (Billeder og Kontaktpersoner). Du vil få annonceret antallet af vedhæftede filer. Andre vedhæftede filer såsom videoer, tekstfiler og lignende vil blive lagret på din MiniVision 2's interne hukommelse.

Benyt **Op** eller **Ned** knapperne for at navigere til en besked som har en eller flere vedhæftede filer og tryk på **OK** knappen for at åbne beskeden. I menuen kan du vælge "Vedhæftede".

Specifikt for billeder: Din MiniVision 2 vil præsentere billedet direkte i skærbilledet. Du kan vælge at gemme billedet ved at trykke på OK knappen og vælge "Gem" elementet. Billedet vil blive gemt automatisk i den interne hukommelse i din MiniVision 2 og du kan finde det igen i Galleri applikationen.

Specifikt for Kontaktpersoner VCF: Din MiniVision 2 vil automatisk foreslå at importere kontakten / kontakterne direkte til din liste over Kontaktpersoner. Vælg "Ja" for at bekræfte.

Specifikt for andet: Når du modtager en vedhæftet fil som er i et format der ikke understøttes af din MiniVision 2, vil du stadig have mulighed for at gemme det på den interne hukommelse. Vælg "Ja" for at bekræfte at du ønsker at gemme filen, og den lagres automatisk i en mappe der hedder Download.

Godt at vide: Indeholder beskeden flere vedhæftede filer vil du få præsenteret en liste. Benyt **Op** eller **Ned** knapperne for at navigere i mellem dem og tryk på **OK** for at åbne eller udføre den bagvedliggende handling.

Besvar en besked

Benyt **Op** eller **Ned** tasten fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen for at navigere til den SMS besked som du ønsker at besvare og bekræft med **OK** tasten. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne igen til du lander på "Besvar" elementet og tryk på **OK** tasten.

Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv den ønskede tekst med det fysiske tastatur, eller gør brug af talegenkendelse, og bekræft afsendelsen af beskeden ved at trykke på **OK** tasten. Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Slet en besked

Benyt **Op** eller **Ned** tasten fra en af dine mapper og naviger derved til den SMS besked som du ønsker at slette, og benyt **OK** tasten for at vælge. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen over dine muligheder, indtil du lander på "Slet" elementet, hvorved du kan trykke på **OK** tasten.

Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen. I begge tilfælde vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig "Indbakke" mappen.

Slet alle beskeder

For at få mulighed for at slette samtlige SMS beskeder som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at bekræfte valget om at slette alle beskeder. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer

Modtager du en SMS besked fra et ukendt nummer, vil du have mulighed for at tilføje det direkte til din liste over kontaktpersoner, direkte gennem Beskeder funktionen. Benyt din **Op** eller **Ned** tast fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen for at navigere til samtalen med det ukendte telefonnummer.

Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision 2, og du placeres automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Brug **Op** eller **Ned** tasten til du lander på "Tilføj til Kontaktpersoner", og bekræft med **OK** tasten. Et skærbillede med trin for oprettelse af ny kontaktperson vil blive præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er udfyldt. Følg herefter vejledningen fra sektionen « **Opret en ny kontaktperson** » til at udfylde resten af felterne.

Ring til en afsender

Det anbefales altid at gøre brug af « **Telefon** » funktionen på din MiniVision, når du skal foretage et opkald. Du kan dog også foretage opkald direkte fra Beskeder funktionen.

Fra Hovedskærmen af din Beskeder funktion skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til den besked du har modtaget fra kontaktperson - eller det telefonnummer - som du ønsker at ringe til. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Ring op" elementet, og tryk på **OK** tasten.

Indstillinger

For at tilgå indstillinger for din Beskeder funktion skal du benytte **Menu** tasten, hvorefter du trykker på **Op** eller **Ned** for at navigere til "Indstillinger", og tryk på **OK** tasten for at godkende. Du præsenteres nu for dine indstillingsmuligheder. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at vælge et af følgende elementer.

- **Struktur for beskeder:** Giver dig mulighed for at angive hvorvidt du ønsker strukturen af dine SMS beskeder i Samtaletråd eller Kronologisk tilstand. Som standard vil Samtaletråd være aktiveret. Se mere under introduktionen under « **Beskeder** ».
- **Leveringsrapport:** Med denne indstilling ændrer du status fra "Meddelelse sendt" til "Meddelelse modtaget", når modparten har modtaget din SMS besked. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Du kan trykke på **OK** tasten for at aktivere indstillingen.
- **Notifikation:** Herunder kan du angive hvilken form for notifikation du ønsker når du modtager en ny SMS besked. Du har to muligheder:
 - **Tilstand:** Tilstand elementet giver dig adgang til at vælge mellem forskellige notifikationsmetoder. Fire forskellige tilstande kan du vælge i mellem: "Ingen", "Vibrere", "Lyd", "Lyd + Vibrere". Som standard vil "Lyd" være aktiveret. Du kan ændre tilstand ved brug af **OK** tasten og ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af **OK** tasten.
 - **Lyd:** Her kan du angive hvilken notifikationslyd du ønsker ved modtagelse af ny SMS besked. Som standard vil lyden med navnet "Adara" være angivet. Tryk på **OK** for at få mulighed for at ændre på din aktuelle lydtoner. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere i listen over tilgængelige lyde. Når du navigerer i listen vil din MiniVision afspille lyden som du lander på, bare i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Notifikationslyden gemmes og du placeres automatisk tilbage ved de andre felter.
 - **Afsender notifikation:** Giver dig en annoncering i form af en notifikation af navnet på afsender af en besked, når denne modtages. Når denne mulighed er aktiveret vil din MiniVision 2 annoncere navnet på kontaktpersonen som har sendt beskeden til dig, eller telefonnummeret såfremt nummeret ikke eksisterer i din liste over Kontaktpersoner.
- **SMS servicecenter:** Giver dig mulighed for at angive et værtsnummer for modtagelse eller afsendelse af SMS beskeder. Som standard vil dette nummer være prædefineret automatisk af din udbyder, når dit SIM kort indsættes i din MiniVision 2. Tryk på **OK** tasten såfremt du ønsker at redigere det angivne nummer.
- **Reset APN:** Nulstil dit Access Point Names (APN) som benyttes til at tilgå internettet og modtage MMS beskeder via dit SIM kort.

Godt at vide: Du kan tilføje dine egne notifikationslyde til brug ved modtagelse af nye SMS beskeder på din MiniVision 2. For at gøre dette skal du tilslutte din MiniVision 2 til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision 2 genkendes på din

computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" mappen og naviger til og vælg "Internt lager". Kopier dine MP3 lydfile til mappen "Notifications" (engelsk ord for "Notifikationer"). De nye notifikationslydfile vil herefter være at finde i listen over lyde, og navnet i listen vil være titlen på selve MP3 lydfile.

Alarm

Med Alarm funktionen bliver du i stand til at håndtere forskellige alarmer og påmindelser. Hovedskærmen for din Alarm funktion giver dig et overblik over alle dine alarmer som du har oprettet på din MiniVision 2. Dine forskellige alarmer præsenteres i kronologisk rækkefølge. Hver alarms om du har oprettet annonceres med følgende format: Alarmtid, Alarm status (aktiveret / deaktiveret), Gentagelse for alarmen (hvis aktiveret, vil dage hvor alarmen skal lyde blive annonceret). Som standard vil du finde to oprettede alarmer:

8:30 – Deaktiveret – Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag.

9:30 – Deaktiveret – Lørdag, Søndag.

Du kan ændre eller slette disse to alarmer, eller oprette nye.

Opret en alarm

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du trykke på **Menu** tasten og navigere til elementet "Opret alarm" ved brug af **Op** og **Ned** og bekræfte med **OK** tasten.

Du præsenteres nu for et skærbillede med mulighed for oprettelse af alarm. Følgende felter skal du angive:

- **Status Aktiveret / Deaktiveret:** Giver dig mulighed for at kende status på alarmen og ændre den. Som standard vil status stå til "Aktiveret" når du er i gang med at oprette en alarm. Tryk på OK tasten for at ændre på status og derved deaktivere den.
- **Klokkeslæt:** Her angiver du klokkeslæt for hvornår alarmen skal lyde. Som standard vil klokkeslæt automatisk blive angivet til det aktuelle tidspunkt, rundet op eller ned til nærmeste 5 minutter. Tryk på **OK** tasten for at ændre på tidspunktet. Først skal du angive timetallet - benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen over timetal og bekræft med **OK** tasten når du lander på det ønskede timetal. Herefter skal du angive minuttallet - benyt igen **Op** eller **Ned** for at navigere til det ønskede minuttal og tryk på **OK** tasten for at godkende. Klokkeslæt gemmes og du er nu tilbage ved oprettelse af alarmen.
- **Ringetone:** Under dette element kan du vælge den ønskede alarmtone for den pågældende alarm. Som standard vil alarmtonen være "Cesium". Tryk på **OK** tasten for at ændre på ringetonen. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen som du præsenteres for, for at finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Ringetonen for den specifikke alarm gemmes, og du er nu tilbage ved oprettelse af alarmen.

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne alarmtoner til din MiniVision 2 mobiltelefon. Tilslut din MiniVision 2 til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens hukommelse. Kopier dine MP3 ringetoner / lydfiler til mappen "Alarms" (engelsk ord for "Alarmer"). Du vil herefter kunne få adgang til at bruge dine egne lyd- og ringetoner i listen over tilgængelige ringetoner - filnavnet vil være det samme som på din computer.

- **Gentagelse:** Du skal herunder angive sekvensen af den pågældende alarm i løbet af en uge. Som standard vil der ikke være gentagelser aktiveret, hvilket betyder at alarmen kun vil lyde én gang på det angivne klokkeslæt. Du kan dog ved brug af "Gentagelse" angive hvilke dage i løbet af en uge alarmen skal lyde. Tryk på **OK** tasten for at indstille sekvensen. Du præsenteres for en liste over alle ugens dage. Benyt nu **Op** eller **Ned** tasten til at navigere gennem listen og benyt **OK** tasten til at aktivere (eller deaktivere) de dage alarmen skal lyde. Du aktivere de dage hvor du ønsker alarmen skal lyde. Når du har angivet de ønskede dage for "Gentagelse", tryk da på **Tilbage** tasten for at vende tilbage til skærbilledet med oprettelse af alarmen.

Når de forskellige felter er angivet skal du trykke på **Menu** for at blive præsenteret for mulighederne du har. Benyt **Op** eller **Ned** for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med **OK**

tasten.

Du får annonceret en bekræftelse på at alarmeren er oprettet med angivelse af hvor længe der er til at alarmeren lyder.

Godt at vide: Tryk på **Tilbage** tasten vil også gemme alarmeren, såfremt mindst ét af felterne er angivet.

Stop en igangværende alarm

Når en alarm lyder vil et skærmbillede med følgende informationer blive præsenteret for dig:

- Klokkeslæt: Giver dig information om det aktuelle klokkeslæt som alarmen er indstillet til.
- Stop: Her stopper du den aktuelle alarm.
- Udsæt: Du har mulighed for at stoppe alarmen og udsætte den til 10 minutter senere.

Benyt dine **Op** og **Ned** taster til at vælge "Stop" eller "Udsæt", og bekræft dit valg ved at trykke på **OK** knappen.

Trykker du på **Tilbage** tasten vil du også stoppe den igangværende alarm.

Godt at vide: Din MiniVision 2 mobiltelefon skal være enten tændt eller låst (dvale) førend at alarmen vil fungere for det angivne klokkeslæt. Er din MiniVision slukket vil alarmen ikke lyde.

Redigér en alarm

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den alarm som du ønsker at ændre på, og vælge den med tryk på **OK** tasten.

Den pågældende alarm vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til det felt du ønsker at redigere - felterne er som følger: Status, Klokkeslæt, Ringtone, samt Gentagelse.

Følg samme procedure som beskrevet under « [Opret en alarm](#) ».

Efter du har redigeret alarmen, tryk på **Menu** tasten for at komme til flere muligheder. Benyt **Op** eller **Ned** for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Du kan også trykke på **Tilbage** tasten som også vil gemme alarmen, såfremt mindst ét af felterne er angivet.

For at annullere de ændringer som du har foretaget for den pågældende alarm, tryk på **Menu** for at åbne flere muligheder og benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Afbryd". Vælg elementet ved at trykke på **OK** tasten.

Aktiver / Deaktiver en alarm

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den alarm som du ønsker at aktivere eller deaktivere, og vælge den med tryk på **OK** tasten.

Alarmen vil blive præsenteret i en redigeringstilstand hvor du kan benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til elementet med "Aktiveret" eller "Deaktiveret", hvor du så trykker på **OK** tasten for at ændre status.

Tryk på **Tilbage** tasten for at gemme ændringen.

Slet en alarm

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den alarm som du ønsker at slette, og vælge den med tryk på **OK** tasten. Den pågældende alarm bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk på **Menu** for at få adgang til yderligere muligheder og benyt **Op** eller **Ned** tasten for at navigere til "Slet", og vælg elementet med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette den pågældende alarm. Naviger til elementet "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Slet alle alarmer

For at få mulighed for at slette samtlige alarmer som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Alarm funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette alle alarmer. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at godkende ønsket om at slette samtlige alarmer. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Angiv en standard alarmtone

Her kan du vælge hvilken tone som du ønsker skal være standard for alle nye alarmer. Fra Hovedskærmen af Alarm funktionen skal du trykke på **Menu** og navigere til "Standard ringetone". Listen over de tilgængelige ringetoner bliver præsenteret for dig - benyt **Op** eller **Ned** for at navigere mellem disse og vælg den ønskede tone ved at trykke på **OK** knappen.

Planlægning

Med Planlægning funktionen har du mulighed for at administrere dine aftaler og forskellige begivenheder.

Hovedskærmen af Planlægning funktionen indeholder en oversigt over alle dine begivenheder som du har gemt på din MiniVision 2 mobiltelefon. Dine begivenheder er sorteret i kronologisk rækkefølge. Hver af dine oprettede begivenheder bliver præsenteret på følgende måde: Navn på begivenhed, dato efterfulgt af tidspunkt. Som standard vil du ikke have nogen oprettede begivenheder i Planlægnings applikationen.

Tilføj en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Planlægning funktionen, tryk på Menu og vælg elementet "Ny begivenhed", som du navigerer til ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne, og vælger med **OK** tasten. Du præsenteres nu for et skærmbillede med mulighed for oprettelse af en begivenhed. Følgende felter skal du angive:

- **Titel:** Giv din begivenhed et navn. Titel vil som standard ikke være udfyldt. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at tilføje tekst til i feltet. Tryk igen på **OK** tasten for at godkende din titel og vende tilbage til det forrige skærmbillede.
- **Dato:** Her skal du angive datoen for begivenheden. Som standard vil din MiniVision angive den aktuelle dato. Tryk på **OK** tasten for at ændre på datoen. Første trin er angivelse af årstal hvor du med **Op** og **Ned** tasterne navigerer i mellem forskellige årstal i en liste - vælg et med **OK** tasten. Andet trin er angivelse af måned - benyt tasterne **Op** og **Ned** til at navigere mellem måneder og vælg et med **OK** tasten. Tredje og sidste trin er angivelse af dag og dato - benyt igen **Op** og **Ned** til at navigere mellem den valgte måneds dage og vælg et med **OK** tasten. Valget gemmes og du kommer nu tilbage til oprettelse af begivenheden.
- **Klokkeslæt:** Her skal du angive klokkeslæt for begivenheden. Som standard vil klokkeslæt automatisk blive angivet til det aktuelle tidspunkt, rundet op eller ned til nærmeste 5 minutter. Tryk på **OK** tasten for at ændre på tidspunktet. Denne gang skal du først angive timetallet ved hjælp af **Op** og **Ned** tasterne, som du benytter til at navigere mellem de forskellige timetal, og igen benytter du **OK** tasten til at godkende. Herefter skal du angive minuttallet - benyt **Op** eller **Ned** tasten for at navigere til det ønskede minuttal og tryk på **OK** tasten for at godkende. Klokkeslæt gemmes og du er nu tilbage i listen over oprettelse af begivenhed.
- **Gentagelse:** Herunder kan du definere sekvensen af gentagelse for den specifikke begivenhed. Som standard vil "En gang" være valgt. Dette betyder at begivenheden kun vil forekomme den ene dag og det ene tidspunkt som du har angivet. Du har dog mulighed for at definere en gentagelse så begivenheden vil blive præsenteret dagligt, ugentligt, månedligt og så videre. Tryk på **OK** tasten for at justere på gentagelsen. Du præsenteres for seks muligheder: En gang, Hver time, Hver dag, Hver uge, Hver måned, Hvert år. Brug **Op** eller **Ned** tasten når du befinder dig i listen til du lander på den ønskede sekvens, og bekræft med **OK** tasten. Gentagelsen gemmes og du placeres automatisk tilbage i skærmbilledet med oprettelse af ny begivenhed.
- **Påmindelse:** Gør det muligt for dig at angive hvornår du ønsker at blive mindet om begivenheden. Du kan vælge imellem syv påmindelser i alt: "På tidspunktet", "5 minutter før", "10 minutter før", "30 minutter før", "1 time før", "Dagen før" samt "2 dage før". Som standard vil "På tidspunktet" være valgt. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på valget, og brug **Op** eller **Ned** tasten til at navigere til en anden mulighed og godkend med **OK** tasten.
- **Ringetone:** Med denne indstilling kan du ændre på tonen for påmindelsen. Tryk på **OK** for at få mulighed for at ændre på din aktuelle ringetone. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne i listen

som du præsenteres for, for at finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på **OK** tasten. Ringetonen gemmes og du er nu tilbage i listen over oprettelse af begivenhed igen.

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne ringetoner til din MiniVision 2 mobiltelefon. Tilslut din MiniVision 2 til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens hukommelse. Kopier de ønskede ringetoner - i formatet MP3 - fra din computer og til mappen "Ringtones". De nye ringetoner vil nu være at finde i oversigten over tilgængelige ringetoner, og titlen vil være den samme som på din computer.

Når de forskellige felter er angivet skal du trykke på **Menu** for at blive præsenteret for mulighederne du har. Herfra skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Trykker du på **Tilbage** tasten bliver oprettelsen også gemt, såfremt mindst ét af felterne er udfyldt.

Stop alarmen for en begivenhed

Når påmindelsen, og derved alarmen, for en begivenhed lyder, vil du blive præsenteret for et skærmbillede med følgende muligheder:

- Titel: Giver dig navnet på begivenheden som alarmen omhandler.
- Stop: Brug dette element til at stoppe alarmen.
- Udsæt: Du har mulighed for at stoppe alarmen for begivenheden og udsætte den til 10 minutter senere.

Benyt dine **Op** eller **Ned** taster til at vælge "Stop" eller "Udsæt", og bekræft dit valg ved at trykke på **OK** tasten. Tryk på **Tilbage** tasten vil også stoppe den igangværende alarm for begivenheden.

Godt at vide: Din MiniVision 2 mobiltelefon skal være enten tændt eller låst (dvale) førend at alarmen for en begivenhed vil fungere, for det angivne klokkeslæt. Er din MiniVision 2 slukket på pågældende tidspunkt vil du ikke få en påmindelse af begivenheden i form af en alarm.

Redigér en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Planlægning funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den begivenhed som du ønsker at ændre på, og vælge den med tryk på **OK** tasten. Den pågældende begivenhed vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte dine **Op** eller **Ned** taster til at navigere til feltet som du ønsker at ændre, ud fra følgende valgmuligheder: Titel, Dato, Klokkeslæt, Gentagelse, Påmindelse samt Ringetone.

Følg proceduren som beskrevet under « **Tilføj en begivenhed** ».

Efter du har redigeret alarmen, tryk på **Menu** tasten for at komme til flere muligheder. Herfra skal du benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Du kan også trykke på **Tilbage** tasten som også vil gemme begivenheden, såfremt mindst et felt er blevet ændret. For at annullere de ændringer som du har foretaget for den pågældende begivenhed, tryk på **Menu** for at åbne flere muligheder og benyt **Op** eller **Ned** tasterne til du lander på "Afbryd". Vælg elementet ved at trykke på **OK** tasten.

Slet en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Planlægning funktion skal du benytte din **Op** eller **Ned** tast for at navigere til den begivenhed som du ønsker at slette, og vælge den med tryk på **OK** tasten. Den pågældende begivenhed bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk på **Menu** for at få adgang til yderligere muligheder og benyt **Op** og **Ned** tasterne til at navigere til "Slet begivenhed", og bekræft valget med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette alle alarmer. Naviger til elementet

"Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Slet alle begivenheder

For at få mulighed for at slette samtlige begivenheder som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af Planlægning funktionen trykke på **Menu**, hvorefter du navigerer til elementet "Slet alle" med **Op** eller **Ned** tasterne, og vælg elementet med **OK** tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette alle dine begivenheder. Naviger til "Ja" og benyt **OK** tasten for at bekræfte valget om at slette alle begivenhederne. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Angiv en standard ringetone

Her kan du vælge hvilken tone som du ønsker skal være standard for alle nye begivenheder. Fra Hovedskærmen af Planlægning funktionen skal du trykke på **Menu** og navigere til "Standard ringetone". Listen over de tilgængelige ringetoner bliver præsenteret for dig - benyt **Op** eller **Ned** for at navigere mellem disse og vælg den ønskede tone ved at trykke på **OK** knappen.

Find en begivenhed

Fra Hovedskærmen af din Planlægning funktion kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at indskrive og derved søge efter navnet på en begivenhed. Listen over dine begivenheder filtreres alt efter hvad du indskrives. Du kan herefter navigere ned gennem listen over de indekserede begivenheder ved at bruge **Op** og **Ned** tasterne.

For at slette et tegn som du har indskrevet skal du blot benytte **Tilbage** tasten (Slet tasten). Så snart du finder den ønskede begivenhed skal du blot trykke på **OK** tasten for at gennemgå detaljerne for begivenheden.

Kamera

Med Kamera applikationen kan du tage billeder ved brug af det indbyggede kamera som er placeret på bagsiden af din MiniVision 2.

Tag et billede

Så snart du starter Kamera applikationen vil billedet fra kameraet blive vist i skærbilledet. Du vil også høre et lydsignal hvert tredje sekund som fortæller dig at kameraet er aktiveret. Peg nu kameraet mod objektet eller begivenheden som du ønsker at tage et billede af og tryk på OK knappen når du ønsker at tage billedet. Et karakteristisk lydsignal vil blive afspillet når billedet tages.

Billedet bliver automatisk gemt i den interne hukommelse i din MiniVision 2, og via en computer kan det findes i "DCIM" mappen. Du kan også gennemse billedet, og alle dine andre billeder, i "Galleri" applikationen.

Godt at vide: Med Menu knappen, når du befinder dig i Kamera applikationen, kan du komme direkte til din "Galleri" applikationen.

Godt at vide: Lydsignalet som du hører hvert tredje sekund kan godt deaktiveres ved at deaktivere elementet "Giv lydsignal når kamera eller LED er aktiveret" som du finder under Indstillinger og "Skærmlæser".

Galleri

I Galleri applikationen kan du gennemse de billeder som du har taget med din MiniVision 2, eller de billeder som du har modtaget via MMS, og som du har gemt.

Hvert billedet som du har i dit galleri vil blive annonceret med følgende information: Titel på billedet samt Dato for billedet (dag / måned / år / time (timer) / minut (minutter) / sekund (sekunder)).

Som standard vil billeder som du tager med din MiniVision 2 mobiltelefon ikke have en titel. **Dine billeder vil blive sorteret i kronologisk rækkefølge, fra seneste til ældste.**

Se et billede

Når du starter din Galleri applikation vil det seneste billede du har taget blive vist i skærbilledet. Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder som findes i din MiniVision 2.

Når du ser på et billede har du følgende muligheder:

Knap **1**: Zoom Ud (8 niveauer er tilgængelige)

Knap **3**: Zoom Ind (8 niveauer er tilgængelige)

Knap **2**: Flyt Op

Knap **4**: Flyt Ned

Knap **6**: Flyt Højre

Knap **8**: Flyt Ned

Godt at vide: Zoom niveauet nulstilles hver kan du skifter billede ved brug af **Op** eller **Ned**.

Søg efter billede ud fra dato

Du har mulighed for at søge efter et billede ud fra datoen det er taget ved at trykke på Menu knappen, navigere til og vælge "Søg" med Op eller Ned og bekræfte med OK knappen. Din MiniVision 2 tilbyder dig at søge efter et billede som befinder sig i den interne hukommelse og med relation til datoen. Benyt Op og Ned knapperne igen for at angive en søgedato sorterede ud fra måned og brug OK knappen til at bekræfte. MiniVision 2 vil nu præsentere billeder der er taget ud fra dato.

Omdøb et billede

Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som du ønsker at omdøbe, og tryk nu på **OK** knappen for at tilgå muligheder for det specifikke billede. Brug igen **Op** og **Ned** i listen over elementer til du lander på "Omdøb", brug **OK** knappen til at bekræfte. Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv det nye navn ved brug af det fysiske, alfanumeriske tastatur eller ved brug af talegenkendelse, og bekræft din nye titel på billedet med **OK** knappen. Din MiniVision 2 beder dig bekræfte om du ønsker billedet skal omdøbes.

Send et billede via MMS

Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som du ønsker at dele / sende, og tryk nu på **OK** knappen for at tilgå muligheder for det specifikke billede. Brug igen **Op** og **Ned** i listen over elementer til du lander på "Send", brug **OK** knappen til at bekræfte. Du præsenteres for et nyt skærbillede som giver dig mulighed for at vælge hvem du ønsker at sende billedet til:

- **Kontakter:** Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en besked til. Brug **Op** og **Ned** for at navigere mellem dine kontaktpersoner og tryk på **OK** knappen for at vælge.
- **Angiv telefonnummer:** Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en besked til, ciffer for ciffer. Angiv telefonnummeret ved brug af det fysiske tastatur og tryk på **OK** knappen.

Når du har valgt en modtager kan du skrive en besked til, som er valgfrit, og tryk på **OK** knappen for at sende MMS beskeden afsted, med billedet, og du returnerer automatisk til Galleri applikationen.

Billededetaljer

Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som du ønsker at dele / sende, og tryk nu på **OK** knappen for at tilgå muligheder for det specifikke billede. Brug igen **Op** og **Ned** i listen over elementer til du lander på “Detaljer”, brug **OK** knappen til at bekræfte. Du præsenteres for et vindue der indeholder følgende informationer:

- Titel på billedet.
- Dato for billedet.
- Fil: Giver dig billedets placeringen i hukommelsen samt filnavnet på selve billedet.

Tryk på **Tilbage** knappen for at returnere til dine billeder.

Slet et billede

Benyt **Op** og **Ned** knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som du ønsker at slette, og tryk på **OK** knappen for at tilgå muligheder for det specifikke billede. Brug igen **Op** og **Ned** i listen over elementer til du lander på “Slet”, brug **OK** knappen til at bekræfte. Du bliver bedt om at bekræfte dit ønske. Vælg “Ja” for at bekræfte eller “Nej” for at annullere.

Slet alle billeder

Du kan også slette alle dine billeder ved at trykke på **Menu** knappen når du befinder dig i listen med dine billeder, og vælg elementer “Slet alle”, som du kommer til ved brug af **Op** eller **Ned**, og bekræft med **OK** knappen. Du bliver også her bedt om at bekræfte dit ønske. Vælg “Ja” for at bekræfte at du ønsker at slette samtlige billeder, eller “Nej” for at annullere.

FM Radio

FM Radio funktionen gør det muligt for dig at lytte til radiostationer på FM radiofrekvenser.

Lyt til radio

For at påbegynde til FM Radio skal du tilslutte hovedtelefoner i porten som du finder på højre side af din MiniVision 2 mobiltelefon. Disse benyttes som antenne til at opfange FM radiosignalet som befinder sig omkring dig.

- Du benytter din **OK** tast til at sætte en afspilning på pause, og genoptage afspilningen igen.
- Du benytter din **Op** tast til at springe til næste frekvens (du springer med 0.1 MHz hver gang).
- Du benytter din **Ned** tast til at springe til forrige frekvens (også her springer du med 0.1 MHz).

Godt at vide: Trykker og holder du på **Op** tasten vil du automatisk vælge næste radiostation.

Trykker og holder du på **Ned** tasten vil du automatisk vælge forrige radiostation.

Angiv en radiostation som favorit

Når du lytter til en FM Radiostation kan du trykke og holde på en af de numeriske taster i dit tastatur (1 til 9), for derved at tilføje den specifikke frekvens (radiostation) til listen over dine favoritter.

Efterfølgende kan du med et hurtigt tryk på en af de numeriske taster springe hurtigt og direkte til din allerede gemte favoritstation.

Benyt Menu knappen til at åbne FM Radio mulighederne, og benyt **Op** eller **Ned** knapperne til at navigere mellem dine forskellige muligheder, og tryk på **OK** når du lander på et element som du ønsker at benytte:

- Favoritstationer: Giver dig en oversigt over dine favorit FM Radio stationer. Benyt **Op** og **Ned** tasterne til at navigere gennem listen og tryk på **OK** for at vælge din favoritstation og påbegynde afspilningen.
- Skift lyden over til højttaleren / hovedtelefoner: Sender lyden enten direkte ud via hovedtelefoner eller ud via højttaleren som befinder sig på bagsiden af din MiniVision 2.

Godt at vide: Når du lytter til radio vil din MiniVision 2 automatisk aktivere Standby tilstand (se mere i afsnittet "Standby"). Dog vil radioen stadig spille. For at ændre radiostation, justere på lydstyrken, sætte på pause eller starte igen skal du først trykke på "Afbryd opkald" knappen for at vække din MiniVision 2.

Lysdetektering

Med denne applikation kan du få annonceret lysstyrke niveauet med lyssensoren som er placeret på bagsiden af din MiniVision 2.

Hvordan får jeg oplyst lysstyrke niveauet?

Peg med bagsiden af din telefon hen mod et område som du ønsker detekteret. Er området lyst vil din MiniVision 2 enten give et højt lydssignal eller en høj procentdel. Er området mørkt vil din MiniVision 2 enten give et lavt lydssignal eller en lav procentdel.

Du kan ændre på selve notifikationen i indstillingerne ved brug af « Menu » knappen, hvor du kan vælge mellem:

- “Procentdel” som giver dig mængden af lys ved en annoncering af procentdelen.
- “Lydssignal” som er standard og som giver dig en indikation via lyd.

Farvetester

Med Farvetester funktionen bliver du i stand til at genkende og finde farver via din MiniVision 2. Så snart du starter funktionen præsenteres du for tre muligheder:

Annoncer farver

Med denne mulighed kan du benytte kameraet på din MiniVision 2 mobiltelefon til at annoncere farven på objektet som du peger kameraet hen på. Annonceringen af en farve bliver gentaget hvert sekund eller når farven ændre sig.

For at optimere resultatet af farvegenkendelsen anbefales det at holde bagsiden af din MiniVision 2, altså selve kameraet, placeret cirka 10 til 15 centimeter fra objektet, og i god belysning.

Listen over de farver som din MiniVision 2 kan opdage er som følger: Rød, Bourgogne, Brun, Orange, Gul, Gul grøn, Grøn, Smaragdgrøn, Turkis, Blå, Marineblå, Lilla, Magenta, Lyserød, Hvid, Grå og Sort.

Information omkring skygge kan i enkelte tilfælde blive annonceret efter angivelse af farven: Svag, Lys, Mørk, Meget mørk.

Find en farve

Her bliver du i stand til at benytte kameraet på din MiniVision til at lokalisere en specifik farve. Dette betyder altså at du kan finde et objekt hurtigt, såfremt du kender farven på det. Naviger med tasterne **Op** og **Ned** for at komme til den farve du ønsker at finde i den liste som du præsenteres for.

Tryk på **OK** tasten for at bekræfte den farve som du ønsker at finde og peg herefter kameraet mod objektet. Et lydsignal vil blive afspillet gentagende gange når farven er detekteret. Du kan ændre på hvilken form for annoncering du ønsker ved at navigere til elementet "Feedback ved lokalisering af farve".

Feedback ved lokalisering af farve

Her kan du ændre på den annoncering der sker, når du benytter "Find en farve" funktionen. Du præsenteres for tre muligheder:

- Lyd: Et lydsignal vil blive afspillet gentagende gange når farven er detekteret.
- Vibration: Du kan også vælge vibration i stedet for, hvilket betyder at din MiniVision vibrerer når den specifikke farve detekteres.

Lyd og Vibrationer: En kombination af både lyd og vibration når den specifikke farve genkendes.

Genkend Pengesedler

Med Genkend Pengesedler applikationen kan du nu gøre brug af din MiniVision 2's kamera til at identificere værdien på en given pengeseddel.

Opdatering af data

KAPSYS opdaterer regelmæssigt databasen som applikationen benytter. Når du starter applikationen på din MiniVision 2 vil du muligvis blive præsenteret for et opdaterings vindue. Vælg elementet "OK" med enten **Op** eller **Ned** tasten og bekræfte den ønskede handling med **OK** tasten, for derved at installere de seneste identifikations data. Dette vil hver gang forbedre identificeringen.

Identificer en pengeseddel

For at optimere identifikationen anbefales det at placere den udfoldede pengeseddel på en plan overflade og holde din MiniVision 2 mellem 20 og 30 centimeter væk fra pengesedlen i et godt belyst miljø.

Så snart din MiniVision 2's kamera opdager pengesedlen, og identificerer den, vil dens værdi automatisk blive annonceret og præsenteret på skærmen. Det er nu muligt at aflæse flere pengesedler efter hinanden.

Lommeregner

Lommeregner funktionen giver dig mulighed for at udføre simple matematiske operationer ved brug af det fysiske tastatur på din MiniVision 2.

Udfør en udregning

For at udføre en udregning skal du benytte de numeriske taster til at angive tal og operative tegn i redigeringsfeltet.

- Dine taster fra **0** til **9** indskriver det pågældende tal.
- Med **Stjerne** tasten kan du angive et matematisk tegn som i rækkefølge er: Plus, Minus, Multiplikation (Gange), Division, Punktum samt Komma.
- Når du skal udregne resultatet skal du benytte enten **Firkant** tasten eller **OK** tasten, som begge giver dig resultatet.
- Med **Tilbage** tasten kan du slette det senest indskrevne tegn og / eller tal.
- Trykker du på **Menu** tasten bliver du præsenteret for muligheden for at vælge elementet "Ryd", hvilket fjerner det du har indskrevet.

Godt at vide: Når du har bedt om resultatet kan du benytte **Op** eller **Ned** tasten til at få gentaget resultatet af formlen. Du kan også fortsætte udregningen ved blot at fortsætte ved at angive et matematisk tegn efterfulgt af tallet som du ønsker at benytte.

Lydoptager

Lydoptager applikationen tilbyder dig muligheden for at optage lyde, såsom talemæddelelser eller oplevelser, og afspille dem senere hen.

Optag en lyd

For at påbegynde en lydoptagelse skal du navigere til "Ny optagelse" med **Op** eller **Ned** knapperne, og vælge ved brug af **OK** knappen. Ved det tredje lydsignal starter optagelsen. Tal i nærheden af mikrofonen som er lokaliseret i bunden af din MiniVision 2, lige til venstre for USB porten. Under en igangværende lydoptagelse kan du gøre brug af følgende funktioner:

- **Op** og **Ned** knap: Gentager den aktuelle varighed af lydoptagelsen.
- **Tilbage** knap: Stopper den aktuelle lydoptagelse.
- **OK** knappen: Sætter optagelsen på pause, hvorefter du så har følgende muligheder:
 - **Gem som stopper optagelsen og gemmer den.**
 - Genoptag som sætter optagelsen i gang igen.

Når en lydoptagelse er gemt bliver du automatisk placeret tilbage i Lydoptager applikationen. Din optagelse er derefter tilgængelig under elementet "Oversigt over optagelser"

Godt at vide: Den pågældende optagelse gemmes i "Audio" mappen i den interne hukommelse på din MiniVision 2.

Lyt til en lydoptagelse

Fra Hovedskærmen af Lydoptager applikationen skal du benytte **Op** eller **Ned** knapperne til du lander på elementet "Oversigt over optagelser", og trykke på **OK** knappen. En oversigt over alle dine optagelser præsenteres for dig.

Dine lydoptagelser præsenteres i kronologisk rækkefølge, ud fra oprettelsen, den seneste præsenteres først. Hver lydoptagelse sorteres efter: År – Måned – Dag – Time – Minutter – Sekunder.

Naviger til den ønskede lydoptagelse ved brug af **Op** og **Ned** knapperne i listen og tryk på **OK** knappen for at åbne den. Benyt igen **Op** eller **Ned** knapperne for at navigere til elementet "Lyt" og bekræft med **OK** knappen. Tryk på Tilbage knappen for at stoppe afspilningen, eller vent til afspilningen er færdig.

Godt at vide: Du har mulighed for at få yderligere information om selve lydoptagelsen ved at navigere til og vælge "Detaljer" elementet (Du får Navn, Dato samt Varighed).

Omdøb en optagelse

Fra Hovedskærmen af Lydoptager applikationen skal du benytte **Op** eller **Ned** knapperne til du lander på elementet "Oversigt over optagelser", og trykke på **OK** knappen. En oversigt over alle dine optagelser præsenteres for dig.

Naviger til den ønskede lydoptagelse som du ønsker at omdøbe ved brug af **Op** og **Ned** knapperne i listen og tryk på **OK** knappen for at åbne den. Benyt igen **Op** eller **Ned** knapperne for at navigere til elementet "Omdøb" og bekræft med **OK** knappen. Redigeringsfeltet med den aktuelle titel præsenteres for dig. Når du har foretaget ændringen og omdøbt til det ønskede, tryk da på **OK** knappen for at gemme det nye navn og vende retur til de forrige elementer.

Slet en lydoptagelse

Fra Hovedskærmen af Lydoptager applikationen skal du benytte **Op** eller **Ned** knapperne til du lander på elementet "Oversigt over optagelser", og trykke på **OK** knappen. En oversigt over alle dine optagelser præsenteres for dig.

Naviger til den ønskede lydoptagelse som du ønsker at slette ved brug af **Op** og **Ned** knapperne i listen og tryk på **OK** knappen for at åbne den. Benyt igen **Op** eller **Ned** knapperne for at navigere

til elementet "Slet" og bekræft med **OK** knappen. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette optagelsen. Naviger til elementet "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Noter

Noter funktionen tilbyder dig muligheden for at oprette, redigere, læse samt slette egne noter i et tekstformat.

Hovedskærmen af din Noter funktion giver dig et komplet overblik over alle dine noter som du har oprettet på din MiniVision 2.

Dine noter sorteres i kronologisk rækkefølge - senest oprettede note er placeret øverst. Hver af dine oprettede noter bliver præsenteret på følgende måde: Indholdet af noten - Dato for oprettelse - Tidspunkt for oprettelse. Som standard vil du ikke have nogen oprettede begivenheder i Planlægnings applikationen.

Opret en note

Direkte fra Hovedskærmen af Noter funktionen skal du trykke på **Menu** tasten og vælge elementet "Opret ny note" og trykke på **OK** tasten. Du præsenteres nu for et redigeringsfelt hvor i kan indskrive din note. Når du har indskrevet eller dikteret den ønskede tekst skal du trykke på **OK** tasten for at gemme den og du vender automatisk tilbage til hovedskærmen, hvor du har dit overblik over alle dine noter.

Når du er i gang med at oprette en note eller når du redigerer en, vil du få adgang til yderligere muligheder hvis du trykker på Menu tasten:

- Gem: Gemmer den pågældende note.
- Afbryd: Annuller redigeringen og fortryd indtastning.
- Slet alle: Slette indholdet af den aktive note.
- Kopier alt: Kopierer hele indholdet af den pågældende note.
- Klip alt: Giver dig mulighed for at klippe indholdet af noten, hvorved teksten fjernes og placeres i udklipsholderen.
- Indsæt alt: Indsætter den førkopierede eller førklippede tekst ind i den pågældende note.

Læs en note

Din MiniVision 2 vil automatisk begynde at læse indholdet af en note når du lander på den. Benyt blot tasterne **Op** og **Ned** så snart du har åbnet Noter funktionen for at navigere til den note som du ønsker at læse.

Rediger en note

Fra Hovedskærmen af Noter funktionen skal du benytte **Op** og **Ned** tasterne for at finde den note som du ønsker at redigere, trykke på **OK** tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den specifikke note. Benyt igen **Op** og **Ned** for at navigere til elementet "Rediger" og bekræft ønsket med **OK** tasten for at påbegynde redigeringen af blive placeret direkte i et redigeringsfelt. Så snart du har gennemført de ønskede ændringer skal du blot trykke på **OK** for at gemme noten og vende retur til hovedskærmen af Noter funktionen.

Slet en note

Fra Hovedskærmen af Noter funktionen skal du benytte **Op** og **Ned** tasterne for at finde den note som du ønsker at slette, trykke på **OK** tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den specifikke note. Benyt **Op** og **Ned** tasterne for at navigere til elementet "Slet" og bekræft ved brug af **OK** tasten. Du vil blive bedt om at bekræfte at du ønsker at slette den pågældende note. Naviger til elementet "Ja" og benyt **OK** tasten til at bekræfte valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Slet samtlige noter

For at få mulighed for at slette samtlige noter, tryk på Menu direkte fra hovedskærmen af Noter funktionen og naviger til elementet "Slet alle" ved brug af **Op** og **Ned** tasterne, og bekræft med **OK** tasten. Du vil blive bedt om at bekræfte at du ønsker at slette alle dine noter. Naviger til "Ja" og

benyt **OK** tasten for at bekræfte valget om at slette dem alle. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til "Nej" og tryk på **OK** tasten for at annullere sletningen.

Søg efter en note


For at søge efter en note skal du direkte fra din Noter funktion benytte det alfanumeriske tastatur til at indskrive noget af den tekst som den pågældende note du leder efter, indeholder. Listen over dine noter filtreres nu i forhold til hvilket bogstav eller ord du har angivet. Du kan herefter navigere ned gennem listen over de indekserede noter ved at bruge **Op** og **Ned** tasterne.

For at slette et angivet tegn skal du benytte Tilbage tasten.

Eksporter en note

Fra Hovedskærmen af Noter funktionen skal du benytte **Op** og **Ned** tasterne for at finde den note som du ønsker at eksportere, og herefter trykke på **OK** tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den specifikke note. Benyt **Op** og **Ned** tasterne for at navigere til elementet "Eksport" og bekræft ved brug af **OK** tasten.

Den pågældende note bliver herved gemt i .TXT format i en "Notes" mappe på den interne hukommelse i din MiniVision 2 Mobiltelefon. Du kan derfra kopierer filen til en computer ved brug af et USB kabel og eventuelt dele den med andre.



Lommelygte

Lommelygte funktionen giver dig mulighed for at udnytte LED lampen placeret øverst oppe på toppen af din MiniVision 2.

Så snart du åbner Lommelygte funktionen vil LED belysningen tænde automatisk.

Tryk på **OK** tasten for at deaktivere og aktivere belysningen. Når du forlader funktionen vil LED belysningen automatisk slukke igen.

Godt at vide: LED belysningen vil også automatisk slukke når / hvis din MiniVision Mobiltelefon går i dvale (låst), eller også hvis du besvarer et indkommende opkald.

Vejr

Med Vejr funktionen kan du nemt og hurtigt få annonceret en vejrudsigt netop der hvor du befinder dig. En velfungerende internet forbindelse er nødvendig for at kunne gøre brug af Talegenkendelsen (Wi-Fi gennem en router eller 3G / 4G gennem dit mobil abonnement).

Hvordan er vejret?

Når du åbner Vejr funktionen på din MiniVision 2 Mobiltelefon vil du få vejrinformation for den aktuelle dag. Gør nu brug af **Op** og **Ned** tasterne for at få vejrudsigten for de følgende dage (op til 5 dage frem).

Hver enkelt vejrudsigt annonceres i det følgende format: Dagen - Status på skyer - Status på temperatur - Vindhastighed.

Godt at vide: Som standard vil annonceringen af temperatur være i grader Celsius og vindhastigheden annonceres som kilometer i timen. Du kan dog trykke på **Menu** tasten og navigere med **Op** og **Ned** tasterne for at vælge "Imperial" og derved få annonceret temperatur i grader Fahrenheit og vindhastigheder som mil i timen.

Få flere detaljer om vejret

Fra Hovedskærmen af din vejr funktion, benyt **Op** og **Ned** tasterne til du lander på den dag du ønsker at få detaljer om, og bekræft med **OK** tasten. Detaljerne om den pågældende dag præsenteres for dig i et nyt skærbillede. Benyt igen **Op** og **Ned** tasterne for at gennemgå vejrinformationerne baseret på fire perioder (morgen, Eftermiddag, Aften, Nat). Hver periode består af det følgende format: Annoncering af periode - Status på skyer - Status på temperatur - Vindhastigheden - Vindretning - Atmosfærisk tryk - Fugtighed - Skydække.

Godt at vide: Vejrudsigten opdateres hver tredje time.

Din MiniVision 2 mobiltelefon er udstyret med en SOS funktion som gør det muligt for dig at foretage opkald eller sende en SMS besked i tilfælde af nødsituationer, til prædefineret kontaktpersoner eller telefonnumre (Bemærk venligst - op til 10 kontaktpersoner kan tilføjes).

Advarsel: KAPSYS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af manglende funktionalitet af alarm (SOS) faciliteten, hvad enten det skyldes et teknisk problem i apparatet eller som følge af at der ikke er noget mobilt netværk tilgængeligt.

Aktivering / Deaktivering af SOS funktionen

Med SOS funktionen kan du opsætte en "automatisk" afsendelse af en alarm i form af enten telefonopringning eller en SMS besked, eller begge, til en eller flere kontaktpersoner eller telefonnumre, i tilfælde af nødsituationer.

For at aktivere SOS funktionen på din MiniVision skal du trykke og holde på **Besvar opkald** tasten i mindst 5 sekunder.

For at stoppe og afbryde SOS funktionen, tryk og hold igen på **Besvar opkald** tasten i mindst 5 sekunder.

Godt at vide: Et skærmbillede med en advarsel dukker op, når SOS funktionen er aktiv.

Indstilling af SOS funktionen

Førend du kan tage SOS funktionen i brug skal du gennemgå følgende:

- **SOS knap:** Her skal du aktivere eller deaktivere selve SOS funktionen, som udløses ved tryk og hold på **Besvar opkald** tasten. Som standard vil SOS Knap funktionen være deaktiveret.
- **Aktiveringsforsinkelse:** Juster på tidsperioden for hvornår SOS funktionen skal aktiveres. Du har to muligheder: 3 eller 5 sekunder. Som standard vil "5 sekunder" være valgt. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på tidsperioden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den anden mulighed, og bekræft med **OK** tasten.
- **Afspil en alarm:** Dette element aktiverer en kraftfuld lydalarm når du aktiverer SOS funktionen. Som standard "Afspil en alarm" ikke være aktiveret.
- **Indstil telefonnumre:** Herunder kan du angive hvilke kontaktpersoner eller telefonnumre på personer som du ønsker at informere ved opkald eller SMS beskeder, i tilfælde af en nødsituation. Du kan angive op til 10 modtagere. Disse kontaktpersoner / telefonnumre vil blive opstillet fra 1 til 10. Når en SOS proces påbegyndes, vil den første kontaktperson eller telefonnummer i listen blive benyttet og derved ringet op og / eller modtage en SMS besked, herefter vil din MiniVision gå videre til nummer to i listen, efterfulgt af nummer tre og så videre. Som standard vil der ikke være udfyldt nogen telefonnumre og / eller kontaktpersoner. Med **Op** eller **Ned** tasten kan du navigere gennem listen og trykke på **OK** tasten for at tildele en kontaktperson og / eller telefonnummer til den pågældende position. Du præsenteres herefter for to muligheder:
 - **Fra Kontakter:** Giver dig mulighed for at tilføje en kontaktperson fra din liste. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at vælge kontaktpersonen som du ønsker at benytte, og godkend med **OK** tasten. Tilbage i oversigten under Indstil telefonnumre bliver kontaktpersonen nu angivet ud for den position som du valgte før.
 - **Indstil telefonnummer:** Her kan du indskrive et telefonnummer manuelt. Indskriv telefonnummeret i redigeringsfeltet og bekræft ved brug af **OK** tasten. Tilbage i oversigten under Indstil telefonnumre bliver telefonnummeret nu angivet ud for den position som du valgte før.
- **Telefon opkald:** Dette punkt aktiverer opkaldsfunktionen når SOS processen sættes i gang. Dine angivne kontaktpersoner og / eller telefonnumre vil blive ringet op en efter en, alt efter rækkefølgen under "Indstil telefonnumre", indtil en besvarer opkaldet. Som

standard er "Telefon opkald" deaktiveret. Når du aktiverer denne funktion får du mulighed for også at justere på "Forsinkelse af svar".

- **Forsinkelse af svar:** Her kan du justere på den periode af tid der skal gå, før din MiniVision ringer videre til det næste nummer, såfremt det forrige opkald ikke besvares. Tre muligheder til dig: "15 sekunder", "30 sekunder" samt "45 sekunder". Som standard vil "30 sekunder" være angivet. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på tidsperioden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en anden mulighed, og bekræft med **OK** tasten.

- **Send besked:** Med denne mulighed kan du aktivere afsendelsen af en SMS besked når SOS processen sættes i gang. Samtlige kontaktpersoner og / eller telefonnumre som du har tilføjet under "Indstil telefonnumre" vil modtage en SMS besked i tilfælde af nødsituationen. Som standard er "Send besked" ikke aktiveret. Når du aktiverer denne funktion får du mulighed for også at prædefinere en "Besked tekst".
 - **Besked tekst:** Her skal du ændre på selve SMS besked som afsendes når SOS funktionen går i gang, i tilfælde af din nødsituation. Som standard vil der i SMS beskeden stå "DETTE ER EN SOS BESKED". Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at redigere teksten. Tryk igen på **OK** tasten for at godkende din egen SMS besked.

Indstillinger

Her får du adgang at aktivere og deaktivere bestemte funktioner, eller ændre på eksisterende indstillinger som din MiniVision tilbyder dig. MiniVision 2 leveres med forskellige prædefinerede indstillinger som alle er justerbare, såsom eksempelvis klokkeslæt, sprog, skærmindstillinger og så videre.

Indstillingerne er inddelt i kategorier:

Visuelle skærm

I denne kategori finder du indstillinger som relaterer sig til den visuelle skærm:

- **Lysstyrke:** Juster på lysstyrken på skærmen. Fem forskellige niveauer kan vælges: "Meget lavt", "Lavt", "Mellem", "Høj" samt "Maksimalt". Som standard er din MiniVision indstillet til "Mellem". Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på lysstyrken, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til de andre muligheder, og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Når du justere på lysstyrken vil det påvirke batteriforbruget.

Jo højere en lysstyrke du vælger, jo højere et batteriforbrug.

- **Dvale:** Giver dig mulighed for at angive den periode af tid der skal gå før din MiniVision går i dvale. Her får du syv muligheder: "15 sekunder", "30 sekunder", "1 minut", "2 minutter", "5 minutter", "10 minutter" samt "30 minutter". Som standard vil "1 minut" være angivet. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på tidsperioden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre muligheder, og bekræft med **OK** tasten.

Godt at vide: Dvalefunktionen har ligeledes en indvirkning af batteriforbruget. Jo længere den visuelle skærm er tændt, jo højere et batteriforbrug.

- **Skrifttype:** Her kan du justere skrifttypen som skal benyttes på din MiniVision. Fem forskellige skrifttyper er tilgængelige: "Default", "Open Dyslexic", "Condensed", "Times" samt "Luciole". Som standard er "Standard" valgt. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på skrifttypen, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til en af de andre muligheder, og bekræft med **OK** tasten.
- **Skriftstørrelse:** Herunder kan du justere på størrelsen på skriften som du ser på den visuelle skærm. Fire forskellige skriftstørrelser er tilgængelige: "Lille" (5 linjer præsenteres i et skærmbillede), "Mellem" (4 linjer præsenteres i et skærmbillede), "Stor" (3 linjer), "Meget stor" (2 linjer). Som standard er "Lille" markeret. Tryk på **OK** tasten for at få adgang til at ændre på størrelsen, og brug **Op** eller **Ned** tasten til at navigere til en anden mulighed og godkend med **OK** tasten.
- **Fed:** Her kan du angive hvorvidt tekst skal være fed eller ikke. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret.
- **Tekst og Baggrundsfarver:** Her kan du justere på kontrasten på tekst og baggrund i den visuelle skærm. Seks forskellige kontraster er tilgængelige: "Hvid på Sort", "Sort på Hvid", "Blå på Gul", "Gul på Blå", "Gul på Sort" samt "Sort på Gul". Som standard er din MiniVision indstillet til "Hvid på Sort".
Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre på kontrasten, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til en anden kontrast, og benyt så **OK** tasten til at godkende.
- **Hastighed for Tekstrulning:** Tekststrengene som strækker sig længere end bredden på den visuelle skærm vil automatisk "rulle" når det er markeret. Benyt denne indstilling til at definere hastigheden på rulningen af tekststrengene. Fem forskellige hastigheder kan vælges i mellem: "Meget langsomt", "Langsomt", "Normal", "Hurtig" samt "Meget hurtigt". Som standard er "Normal" angivet.
Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre på hastigheden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til en anden hastighed som du måtte ønske, og benyt så **OK** tasten til at godkende.
- **Forsinkelse på Tekstrulning:** Med denne indstilling justerer du på tidsperioden der skal gå, før tekststrengen begynder at rulle. Seks forskellige perioder er tilgængelige: "0,25

sekunder", "0,5 sekunder", "1 sekund", "2 sekunder", "3 sekunder" og "4 sekunder". Som standard vil "1 sekund" være angivet. Tryk på **OK** tasten for at ændre, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den periode som du ønsker, og bekræft med **OK** tasten.

- **Visuel Tilstand:** Gør dig i stand til at bestemme hvordan du ønsker at oversigten over applikationer skal se ud. Tre forskellige visuelle tilstande kan vælges i mellem: Tekst (Standard), Ikon eller Ikon og Tekst. Tryk på **OK** knappen for at komme til de forskellige muligheder, benyt **Op** og **Ned** knapperne for at navigere i mellem og aktiver det ønskede format med **OK** knappen.
- **Deaktiver den visuelle skærm:** Denne funktion er dedikeret til blinde brugere af MiniVision 2, som gør det muligt at deaktivere den visuelle skærm fuldstændigt, og derved skjule al information på skærmen. Dette sparer på batteriet og beskytter dit privatliv. Som standard er "Deaktiver den visuelle skærm" ikke aktiveret. Du kan trykke på **OK** tasten for at aktivere funktionen. Bekræft at du ønsker at deaktivere den visuelle skærm ved at navigere til "Ja" med **Op** eller **Ned** tasterne og bekræft med tryk på **OK** tasten.

Godt at vide: Du har kun adgang til denne funktion såfremt "Skærmlæser" er aktiveret (se herunder).

Skærmlæser

I denne kategori finder du indstillinger som relaterer sig til den indbyggede skærmlæser:

- **Skærmlæser:** Aktiverer eller deaktiverer annonceringen af tekst på skærmen. Som standard vil "Skærmlæser" være aktiveret. Det betyder at hver gang du navigerer til et element med **Op** eller **Ned** tasten, vil det blive læst. Såfremt du vælger at deaktivere denne funktion vil din MiniVision 2 mobiltelefon ikke længere tale og du vil ikke længere have adgang til yderligere indstillingsmuligheder for skærmlæseren.
- **Premium talesynteser:** Her kan du downloade premium talesynteser, som har en bedre kvalitet. En internet forbindelse er nødvendig (Wi-Fi eller 3G / 4G).
 - **Download en Premium talesyntese:** Naviger til og vælg "Premium talesynteser" elementet og tryk på **OK** tasten. Du bliver bedt om at bekræfte dit ønske. For at igangsætte download processen skal du navigere til og vælge "Ja" med **OK** tasten. Du præsenteres nu for et nyt skærmbillede hvor du skal vælge hvilken type du ønsker. Naviger til og vælg enten "Mand" eller "Kvinde" og bekræft ved brug af **OK** tasten for at påbegynde hentningen af den nye talesyntese. Så snart hentningen er gennemført præsenteres du for installationen. Vælg "OK" i skærmbilledet og bekræft med **OK** tasten for at påbegynde installationen af den nye talesyntese på din MiniVision 2. Advarsel: Skærmlæseren i din MiniVision afbrydes under hele installationen. Din MiniVision mobiltelefon er klar til brug igen, så snart du hører din skærmlæser med den nye talesyntese.
- Godt at vide: Som standard vil din MiniVision 2 downloade den Premium talesyntese som svarer til det aktuelle, benyttede sprog. Typerne på den eller de talesynteser som du præsenteres for kan variere alt efter sproget som du benytter. MiniVision 2 understøtter kun én Premium talesyntese. Din MiniVision vil derfor automatisk fjerne den kvindelige talesyntese hvis du vælger at installere den mandlige, og omvendt.
 - **Slet en Premium talesyntese:** Naviger til "Premium talesynteser" elementet og tryk på **OK** tasten. Såfremt en Premium talesyntese allerede er installeret bliver du automatisk spurgt om du ønsker at fjerne den. Vælg "Ja" med **OK** tasten for at fjerne den, og afinstallere talesyntesen. Advarsel: Skærmlæseren i din MiniVision afbrydes under hele afinstallationen. Din MiniVision mobiltelefon er klar til brug igen, så snart du hører din skærmlæser med den nye talesyntese.
- **Talehastighed:** Herunder kan du justere på hastigheden på talesyntesen. Ni forskellige hastigheder kan vælges i mellem: Meget langsom, Langsom, Normal, Hurtig, Hurtigere, Meget hurtig, Endnu hurtigere, Hurtigst. Som standard er "Normal" angivet. Tryk på **OK**

tasten for at få mulighed for at ændre på hastigheden, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til en anden hastighed som du måtte ønske, og benyt så **OK** tasten til at godkende.

Godt at vide: Du kan nemt og hurtigt justere på hastigheden på talesyntese ved at benytte genvejen **Firkant + 4** samt **Firkant + 5** for henholdsvis at mindske og øge hastigheden.

- **Vågn op annoncering:** Med denne indstilling kan du justere på den information som du ønsker at modtage når du aktiverer din MiniVision 2. Op til seks typer af information, ud over det aktuelle klokkeslæt, kan du få annonceret, når du aktiverer din MiniVision: "Aktuelle dato", "Batteri niveau", "Netværks status", "Ubesvarede opkald", "Nye beskeder" samt også "Ny software opdatering klar". Som standard vil "Batteri niveau", "Ubesvarede opkald", "Nye beskeder" og "Ny software opdatering klar" være aktiveret. Du kan trykke på **OK** tasten for at ændre indstillingen. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til informationen som du ønsker at få annonceret når du aktiverer din MiniVision, og tryk på **OK** tasten for at aktivere elementet. Du kan benytte **Tilbage** tasten for at godkende dine ændringer.
- **Redigeringsekko:** Giver dig mulighed for at definere hvordan den tekst som du tilføjer i redigeringsfelter skal annonceres. Fire forskellige typer kan du vælge i mellem: "Intet ekko" (tegn annonceres ikke når du indskrifer), "Ekko tegn for tegn" (hvert tegn annonceres), "Ekko ord for ord" (kun hele ord gentages når der trykkes på Mellemrum) samt "Ekko tegn + ord" (hvert tegn annonceres og når der angives et Mellemrum, annoncerer din MiniVision også hele ordet). Som standard er "Ekko tegn for tegn" aktiveret. Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre på ekkoet, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere til en af de andre muligheder som du måtte ønske, og benyt **OK** tasten til at godkende.
- **Annoncer position i liste:** Med denne funktion bliver du informeret positionen for et element i en liste. Hvis du eksempelvis navigerer til det andet element i en liste med i alt ti elementer, så vil din MiniVision 2 annoncere "2 af 10", efter annoncering af det pågældende element.
Som standard er funktionen "Annoncer position i liste" ikke aktiveret.
- **Giv lydsignal når kamera eller LED er aktiveret:** Gør at du hører et lydsignal når enten kamera eller LED lampen er aktiveret / tændt. Dette fortæller dig at en af funktionerne er aktiveret og muligvis opererer i baggrunden og derved forbruger væsentligt mere batteri.

Bluetooth

Under denne kategori kan du aktivere og administrere Bluetooth forbindelser til tilbehør og andre enheder. Som standard finder du Bluetooth deaktiveret på din MiniVision 2 mobiltelefon, så der vil kun være et element at finde. Elementet er "Bluetooth" og med det kan du aktivere og deaktivere Bluetooth teknologien på din MiniVision mobiltelefon. Tryk på **OK** tasten for at aktivere Bluetooth og du får adgang til yderligere muligheder

- **Forbundne enheder:** Herunder kan du administrere indstillinger for Bluetooth enheder som allerede er forbundet til din MiniVision 2. Naviger til og vælg en allerede forbundet Bluetooth enhed fra listen og tryk på **OK** tasten for at få præsenteret yderligere oplysninger relateret til den specifikke enhed. Benyt tasterne **Op** eller **Ned** for at vælge en af følgende muligheder:
 - **Ikke forbundet / Forbundet:** Giver dig den aktuelle status for den pågældende Bluetooth enhed (forbundet eller ikke forbundet)
 - **Afbryd forbindelse:** Afbryder Bluetooth forbindelsen mellem enheden og din MiniVision 2 mobiltelefon.
- **Søg efter enheder:** Påbegynder søgning efter tilgængelige Bluetooth enheder som befinder sig i nærheden af dig. Naviger til Bluetooth enheden i listen som du ønsker at forbinde til ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne og tryk på **OK** tasten for at vælge enheden. I enkelte tilfælde bliver du bedt om at angive en adgangskode - forsøg da med 0000 eller 1234 og bekræft med **OK** tasten (disse er de mest almindelige adgangskoder i Bluetooth

regi). Fungerer det ikke efter hensigten skal du gennemgå dokumentationen for den pågældende enhed som du forsøger at forbinde til.

Godt at vide: Såfremt Bluetooth enheden ikke præsenteres i listen skal du tjekke om den befinder sig i tilslutningstilstand (også kalder pairing mode).

Du kan også forsøge at søge igen ved at trykke på **Tilbage** tasten for at navigere tilbage og derfra vælge "Søg efter enheder" igen.

- **Omdøb:** Her kan du ændre på det Bluetooth navn som din MiniVision 2 udsender, som gør det nemmere at forbinde med en anden Bluetooth enhed. Som standard vil navnet være "MiniVision 2". Tryk på **OK** tasten for at få mulighed for at ændre navnet, ved at blive placeret i redigeringsfeltet. Tryk igen på **OK** tasten for at godkende ændringen.

Godt at vide: For at forlænge batteriets levetid mellem opladningerne kan det anbefales at deaktivere Bluetooth når du ikke skal gøre brug af den.

Wi-Fi

Herunder får du adgang til at aktivere Wi-Fi på din MiniVision 2 mobiltelefon, som giver dig adgang til et trådløst netværk. Wi-Fi benyttes til at opdatere software, til Stemmekommando og diktering, til download af Premium Voices samt også for Vejr funktionen. Som standard vil Wi-Fi være deaktiveret på din MiniVision 2, så du præsenteres første gang kun for en mulighed, som gør dig i stand til at aktivere Wi-Fi funktionen. Benyt **OK** tasten til at aktivere Wi-Fi elementet og du får adgang til følgende muligheder:

- **Status:** Dette element vil give dig navnet på det Wi-Fi netværk som du aktuelt er forbundet til. Såfremt du ikke har forbindelse til et Wi-Fi netværk vil din MiniVision 2 annoncere følgende: "Ikke forbundet".
- **Kendte netværk:** Herunder kan du håndtere og gennemgå Wi-Fi netværk som du allerede har oprettet forbindelse til. Naviger til og vælg et af de Wi-Fi netværk i listen og tryk på **OK** tasten for at få adgang til yderligere muligheder relateret til det pågældende netværk. Benyt herefter **Op** og **Ned** tasterne til at navigere til en af følgende muligheder:
 - **Forbind / Afbryd:** Her kan du forbinde til et gemt netværk eller afbryde forbindelsen til en aktuel Wi-Fi forbindelse.
 - **Glem:** Fjerner den specifikke Wi-Fi forbindelse fra listen over kendte netværk.
- **Søg efter Wi-Fi:** Påbegynder søgning efter tilgængelige Wi-Fi netværk som befinder sig i nærheden af dig. Naviger til det Wi-Fi netværk i listen som du ønsker at forbinde til ved at bruge **Op** eller **Ned** tasterne og tryk på **OK** tasten for at vælge det. For at forbinde til Wi-Fi netværk der er sikret, vil en adgangskode blive påkrævet. Angiv adgangskoden til Wi-Fi netværket i redigeringsfeltet og bekræft med **OK** tasten. Til slut i processen vil din MiniVision 2 informere dig omkring status på Wi-Fi forbindelsen og automatisk placere dig tilbage i listen over Indstillinger.

Godt at vide: Der findes routere som udsender Wi-Fi frekvenser i både 5Ghz og 2,4GHz båndbredde. MiniVision 2 understøtter kun Wi-Fi 2,4Ghz båndet. Såfremt din router eller andre netværk du møder ikke dukker op på din MiniVision 2 når du søger efter Wi-Fi skal du tjekke hvorvidt det er et 2,4GHz netværk, eller om det kan aktiveres. For at gøre dette kræver det adgang til din router (kontakt eventuelt din udbyder hvis nødvendigt), og tjek at den sender i både 5Ghz og 2.4Ghz frekvensbåndet, og at hvert netværk for begge bånd har forskellige navne (SSID).

Godt at vide: Såfremt at en Wi-Fi forbindelse fejler, betyder det oftest at adgangskoden er forkert. Forsøg derfor igen og vær omhyggelig med angivelse af adgangskoden, specielt er adgangskoden følsom overfor store og små bogstaver. I situationer hvor du oplever udfordringer med allerede etablerede Wi-Fi forbindelse, vend tilbage til "Kendte netværk" og glem det specifikke netværk, for herefter at oprette forbindelsen på ny fra "Søg efter Wi-Fi" funktionen.

Godt at vide: For at forlænge batteriets levetid mellem opladningerne kan det anbefales at deaktivere Wi-Fi når du ikke skal gøre brug af den.

Netværk

Under denne kategori kan du håndtere din MiniVision 2's netværksmuligheder:

- **Flytilstand:** Gør det muligt for dig at deaktivere samtlige kilder der benytter radiotransmission i din MiniVision mobiltelefon (Wi-Fi, Bluetooth samt mobilt netværk). Som standard er "Flytilstand" deaktiveret.
- **Mobildata:** Her kan du aktivere eller deaktivere brugen af mobilt internet, bestemt af dit abonnement. "Mobildata" er som standard aktiveret. Deaktiverer du dette element vil Vejr funktionen, software opdateringer, download af premium talesynteser samt talegenkendelse kun ske ved brug af Wi-Fi.
- **Dataroaming:** Brug dette element til at aktivere eller deaktivere brugen af mobilt internet når du befinder dig udenlands. Om elementet er aktiveret eller deaktiveret kontrolleres af din udbyder. Det er i enkelte tilfælde nødvendigt at aktivere dataroaming, selv når du befinder dig i dit hjemland, for enkelte udbydere.
- **4G Opkald:** Her kan du aktivere eller deaktivere opkald understøttet af 4G. Kontakt din udbyder for at finde ud af om det er muligt at benytte 4G Opkald.

Sikkerhed

Herunder har du mulighed for at håndtere sikkerheden på din MiniVision 2 mobiltelefon, indstillinger som eksempelvis ændring af PIN kode eller tilføjelse af en telefonlås.

- **Konfigurerer SIM kort:** Denne er kun tilgængelig såfremt du har indsat et SIM kort i din MiniVision 2 mobiltelefon. Det giver dig adgang til at fjerne PIN koden fra dit SIM kort, eller ændre den. Du præsenteres for to muligheder:
 - **Lås SIM kort:** Giver dig mulighed for at definere hvorvidt du ønsker at dit SIM kort skal være låst eller ikke. Deaktiverer du "Lås SIM kort" vil du ikke længere være nødt til at indskrive din PIN kode når du tænder for din MiniVision.
 - **Skift pinkode til SIM kort:** Her kan du ændre PIN koden på dit SIM kort. Angiv din nuværende PIN kode ved brug af det numeriske tastatur og bekræft med **OK** tasten. Du præsenteres nu for et nyt redigeringsfelt hvor du skal indskrive din nye, ønskede PIN kode, og igen bekræfte med **OK** tasten. Til sidst skal du angive din nye, ønskede PIN kode igen og bekræfte med **OK** tasten, for at gennemføre ændringen.
- **Telefonlås:** Tilføjer en ekstra låseskærm når din MiniVision går i dvale. Du kan vælge i mellem tre af de følgende muligheder:
 - **Ingen:** Vælger du denne, vil du ikke blive præsenteret for en låseskærm. Som standard er "Ingen" også aktiveret.
 - **Lås op via kode:** Her kan du angive en 4-cifret låsekode. Angiv din ønskede kode i redigeringsfeltet og bekræft med **OK** tasten. Du bliver bedt om at angive koden endnu engang, og bekræft nu igen ved brug af **OK** tasten for at godkende låsekoden. Når du næste gang aktiverer din MiniVision fra dvale, vil du blive bedt om at angive din personlige adgangskode, og du benytter **OK** tasten til at godkende angivelsen og derefter kan du bruge den som normalt.
 - **Lås op via tastaturtryk:** Tilføj en tastatur kombination for at låse din MiniVision op. Når du næste gang aktiverer din MiniVision fra dvale, skal du trykke og holde **Stjerne** tasten nede for at låse den op.
- **Vis adgangskoder:** Giver mulighed for at PIN kode samt Telefonlås koden er synlig og kan blive læst af din skærmlæser. Denne indstilling er som standard aktiveret. Det betyder at de tegn du angiver ved PIN kode og Telefonlås felterne vil blive visuelt præsenteret og læst op. Deaktiverer du denne funktion vil din MiniVision 2 erstatte de visuelle tegn med stjerner i stedet, for at forhøje din sikkerhed og skjule dine personlige koder.

Godt at vide: PIN kode og Telefonlås kode vil altid blive annonceret, uagtet af ovenstående indstilling, når du benytter hovedtelefoner med din MiniVision 2.

Sprog

Denne kategori præsenterer det aktuelle sprog som du benytter på din MiniVision 2 mobiltelefon: Benyt tasterne **Op** eller **Ned** for at navigere gennem listen over de forskellige sprog som du kan aktivere, og benyt **OK** tasten hvis du ønsker at ændre sproget. Du bliver bedt om at bekræfte valget. For at bekræfte at du ønsker at ændre sproget skal du vælge elementet "Ja" ved at trykke på **OK** knappen igen.

Tastaturet

Under dette element finder du muligheden for at håndtere indstillinger for din MiniVision 2 mobiltelefons tastatur:

- **Vibrationsfeedback:** Denne funktion gør at du vil mærke en vibration når du trykker på en tast på det fysiske tastatur, for at forsikre dig om, at tastetrykket er registeret. Som standard er "Vibrationsfeedback" deaktiveret.
- **Lydfedback:** Denne funktion gør at du vil høre et stille lydssignal når du trykker på en tast på det fysiske tastatur, for at forsikre dig om, at tastetrykket er registeret. Denne funktion er aktiveret som standard.
- **Vibrere efter angivelse af karakter:** Lader dig mærke en vibration når et tegn er indskrevet i et redigeringsfelt. Som standard er funktionen "Vibrere efter angivelse af karakter" deaktiveret.
- **Lydsignal efter angivelse af karakter:** Lader dig høre et stille lydssignal når et tegn er indskrevet i et redigeringsfelt. Denne funktion er aktiveret som standard.
- **Forsinkelse på angivelse af karakter:** Herunder kan du definere forsinkelsen på den tidsperiode der går fra du angiver et tegn til at det specifikke tegn indsættes i et redigeringsfelt. Fem tidsperioder er tilgængelige: "0,3 sekunder", "0,5 sekunder", "1 sekund", "2 sekunder" samt "3 sekunder". Som standard vil "1 sekund" være angivet. Tryk på **OK** tasten for at ændre, og benyt herefter **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til den periode som du ønsker, og bekræft med **OK** tasten.
- **Besvar opkald med tasterne 0 - 9:** Denne funktion gør det muligt for dig at besvare indgående opkald ved blot at trykke på en af tasterne i det numeriske tastatur (brugbart for brugere med sensorisk nedsættelse eller udfordringer med at identificere **Besvar opkald** tasten). Dette er en funktion som er aktiveret som standard.
- **Hurtig Start:** Med denne funktion kan du associere en specifik funktion eller kontaktperson til en tast på det alfanumeriske tastatur, som en slags hurtig start. Når du har tilføjet en funktion eller en kontaktperson til en tast på dit alfanumeriske tastatur, skal du blot trykke og holde på den pågældende tast for at starte funktionen, eller for at igangsætte et opkald direkte til kontaktpersonen, ude fra Hjemmeskærmen. Benyt tasterne **Op** eller **Ned** for at vælge hvilket nummer du ønsker at benytte til en kontaktperson eller en funktion og tryk på **OK** tasten for at bekræfte (som standard er tast 1 reserveret til voicemail). Vælg herefter en af følgende to muligheder:
 - **Ring til kontaktperson:** Her kan du angive en specifik kontaktperson der skal associeres med tasten. Du præsenteres for en liste over dine kontaktpersoner. Benyt igen **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere mellem dine kontaktpersoner som du har i den liste du præsenteres for, og benyt **OK** tasten for at bekræfte.
 - **Start applikation:** Det samme som ovenstående, her angiver du blot hvilken funktion du ønsker skal starte på den pågældende tast - vælg mellem de 13 tilgængelige MiniVision 2 funktioner. Benyt igen **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere mellem de forskellige funktioner, og benyt **OK** tasten for at bekræfte.

Godt at vide: Du kan også associere en kontaktperson eller en funktion til en alfanumerisk tast direkte fra Hjemmeskærmen. For at gøre dette, tryk og hold på den ønskede tast som ikke allerede er tildelt en handling, når du befinder dig ude på Hjemmeskærmen. Du præsenteres for "Hurtig Start" funktionen og du skal nu vælge mellem kontaktpersoner eller applikationer, som skal tildeles den specifikke tast.

Dato og klokkeslæt

Kategorien Dato og klokkeslæt giver dig adgang til og mulighed for at angive dato og klokkeslæt på din MiniVision 2, såfremt disse ikke opdateres automatisk:

- **Automatisk indstilling dato og klokkeslæt:** Benyt muligheden for at lade netværket automatisk indstille klokkeslæt og dato på din MiniVision 2 mobiltelefon. Som standard er "Automatisk indstilling af dato og klokkeslæt" aktiveret. Tryk på **OK** tasten for at deaktivere funktionen og bliv præsenteret for følgende indstillinger:
- **Angiv dato:** Her indstiller du manuelt datoen på din MiniVision. Først skal du angive årstal, hvilket du kan gøre ved brug af **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere gennem listen over årstal til du lander på det aktuelle, som du godkender ved brug af **OK** tasten. Herefter skal du angive måned, og igen benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere gennem listen og godkende med **OK** tasten. Tredje og sidste trin er angivelse af dag og dato - benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere mellem den valgte måneds dage og godkend med **OK** tasten.
- **Angiv klokkeslæt:** Giver dig mulighed for at indstille klokkeslæt manuelt. Du skal først angive timetallet - benyt **Op** eller **Ned** tasterne til at navigere gennem timerne og benyt **OK** tasten til at godkende. Herefter skal du angive minuttal, og igen benytte **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere gennem listen og godkende med **OK** tasten.
- **Brug 24-timers format:** Gør det muligt for dig at få præsenteret klokkeslæt i enten 24 timers format eller 12 timers format (AM / PM). Indstillingen sker som udgangspunkt automatisk baseret på dit land, men du kan ændre på det manuelt.
- **Vælg tidszone:** Giver dig mulighed for at benytte den tidszone som netværket definerer. Som standard er "Tidszone automatisk" aktiveret. Tryk på **OK** tasten for at deaktivere funktionen og bliv præsenteret for følgende indstillinger:
 - **Vælg tidszone:** Hvor du manuelt kan angive en tidszone efter eget valg. Benyt **Op** og **Ned** tasterne for at vælge den ønskede tidszone og bekræft ved brug af **OK** tasten.

Om telefonen

Under dette element finder du status for din MiniVision 2, opdateringsmulighed med mere:

- **Systemopdateringer:** Her kan du opdatere softwaren på din MiniVision 2 ved brug af en aktiv internet forbindelse. Det anbefales at gøre brug af en Wi-Fi forbindelse til at downloade opdateringen, for at sikre en optimal download proces, spare tid og eventuelle begrænsninger på dit abonnement. KAPSYS udfører løbende vedligeholdelse og forbedringer på software til din MiniVision. Hold dig derfor ikke tilbage med at tjekke om der er opdateringer til din MiniVision regelmæssigt. Er din MiniVision 2 fuldt opdateret vil du få annonceringen "Systemet er opdateret". Når en opdatering er tilgængelig vil du blive præsenteret for en download mulighed. Benyt **Op** eller **Ned** tasterne for at navigere til "Download" elementet og benyt **OK** til at godkende, og påbegynde hentningen. Download processen vil løbende blive annonceret og præsenteret i skærmbilledet. Såfremt din MiniVision går i dvale kan du trykke på **Afbryd opkald** tasten for at aktivere den igen, og du placeres automatisk i skærmbilledet med download processen. Så snart hentningen er gennemført præsenteres du for installationen. Her kan du benytte **Op** eller **Ned** tasterne til at vælge "Installer opdatering" og bekræft med **OK** tasten, for at påbegynde installationen af opdateringen. Du kan opleve at din MiniVision 2 mobiltelefon under installationen automatisk slukker og genstarter efter et par minutter. Vær venligst tålmodig og vent på at du igen hører skærmlæseren i din MiniVision mobiltelefon.

Godt at vide: Download af opdateringen kan tage lang tid alt efter forhold som blandt andet din internet forbindelse. Skulle der ske en fejl under download processen skal du blot forsøge.

- **Status:** Giver dig en masse informationer om status på og for din MiniVision.
 - **Batteristatus:** Annoncerer det aktuelle niveau for batteriet.
 - **Serienummer:** Her får du oplyst det unikke serienummeret for din MiniVision.
 - **IMEI:** Annoncerer det unikke IMEI for din MiniVision.
 - **Bluetooth Adresse:** Giver dig adressen på din Bluetooth tjeneste, som også er unik.

- **MAC Adresse:** Her får du din unikke MAC Adresse for din MiniVision.

- **SIM Status:** Under dette element finder du information der leveres af dit SIM kort.
 - **Netværk:** Returnerer navnet på din udbyder eller netværksoperatør.
 - **Signalstyrke:** Her kan du få oplyst styrken på GSM signalet (Intet signal, Lavt signal, Fint signal, Godt signal og Meget godt signal).
 - **Mobilnetværkstype:** Annoncerer hvilken type af signal du har lige nu (2G, 3G eller 4G).
 - **Roaming:** Giver dig mulighed for at vide om dit SIM kort benytter roaming (Ja eller Nej).
 - **Mit telefonnummer:** Her kan du få bekræftet det telefonnummer som SIM kortet i din MiniVision har.
- **Modelnavn:** Giver dig modelnavnet af din mobiltelefon.
- **Versionsnummer:** Her kan du få annonceret det specifikke versionsnummer af den MiniVision 2 software som du opererer på.

Tekniske specifikationer

Fysiske mål

- Dimensioner: 125 x 60 x 13,5 millimeter
- **Vægt:** 103 g
- **Visuelle skærm:** 2.3" / QVGA (240 x 320 pixels)

Hardware

- **Processor:** Dual Core Cortex-A7
- **Intern hukommelse:** 512 MB RAM, 4 GB Flash
- **Ekstern hukommelse:** Micro SD kort, op til 32 GB
- **Cellulære forbindelser:** 4G / 3G / 2G
- **Trådløse forbindelser:** Wi-Fi 802.11 (2.4 GHz b/g/n) og Bluetooth 4.2
- **SIM kort format:** Et Nano SIM (4FF)
- **Tilslutninger:** Hovedtelefoner JACK 3.5 mm, Micro USB
- **Strømforbrug:**
 - **Batteri:** 1600 mAh Li-ion
 - **Standby:** 200 timer
 - **Taletid:** 7 timer
- **SAR:**
 - **Head:** 1.77 W/Kg
 - **Body:** 1.85 W/Kg
 - **Limbs:** 3.02 W/Kg
- **Flash LED og Kamera:** 2 Megapixels
- **Ringetoner og vibrations funktioner**

I tilfælde af udfordringer

Før du tager kontakt til din forhandler for support anbefales det at gennemgå de følgende anbefalinger:

- For at optimere din MiniVisions ydeevne anbefales det at slukke for den fra tid til anden - gerne en gang om ugen.
- Inden du begynder kan det anbefales at oplade batteriet fuldt ud og udføre følgende tjek alt efter situation:

Min MiniVision vil ikke tænde / Jeg ser kun en sort skærm:

- Tryk og hold på **Afbryd opkald** tasten indtil opstartslyden afspilles, eller du ser lys i skærbilledet.
- Sikre dig at batteriet er helt opladet.
- Tjek forbindelsen mellem MiniVision og selve batteriet, fjern og indsæt batteriet igen, og forsøg gerne at tænde igen.

Det er svært at læse hvad der står på skærbilledet:

- Rengør skærmen.
- Juster lysstyrke niveauet så det tilpasset miljøet du befinder dig i.

Min MiniVision slukker helt af sig selv:

- Tryk og hold på **Afbryd opkald** tasten for at aktivere din MiniVision igen.
- Sikre dig at batteriet er helt opladet.

Batteriniveauet på min MiniVision er lavt:

- Tjek og vær sikker på at du har fulgt retningslinjerne for opladning - 4 timer som minimum.
- For at forbedre batteriforbruget anbefales det at slukke for Wi-Fi og Bluetooth, hvis du ikke benytter det. Du har også mulighed for at justere på lysstyrken i skærmen eller slukke helt for skærmen ved at aktivere elementet "Skærm slukket".

Min MiniVision vil ikke oplade korrekt:

- Vær sikker på at batteriet ikke er helt afladet.
- Sørg for at opladningen foretages under normale forhold i et normalt miljø (0°C til 40°C)
- Tjek gerne placeringen af batteriet - det skal monteres korrekt og være monteret før du tilslutter strømforsyning.
- Vær ligeledes sikker på at du benytter batteriet og strømforsyningen der er leveret af KAPSYS.
- Tjek også at du benytter den korrekte adapter alt efter land.

Min MiniVision vil ikke forbinde til et mobilt netværk:

- Først skal du ændre fysisk placering for at se om din MiniVision får forbindelse til et mobilt netværk andre steder.
- Verificer netværksdækningen, enten med din tjeneste udbyder eller en anden enhed.
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.
- Tjek ydermere gyldigheden af dit SIM kort i samarbejde med din udbyder.
- Forsøg igen senere, da netværket kan være overbelastet.
- Fjern dit SIM kort fra din MiniVision og indsæt det igen.

SIM kort fejl / Ingen ringefunktion er mulig:

- Tjek om du har indsat dit SIM kort korrekt.
- Sørg for at selve chippen i SIM kortet ikke er beskadiget eller ridset.

Jeg kan ikke foretage opkald:

- Vær sikker på at du har angivet et korrekt og gyldigt telefonnummer.
- For internationale opkald, tjek lande- og områdekoder.
- Vær sikker på at din telefon er forbundet til et netværk og at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt.
- Hvis du er udenlands, forhør dig hos din tjeneste udbyder om du har adgang til internationale telefon opkald.
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.

Jeg kan ikke modtage opkald:

- Vær sikker på at din MiniVision er tændt og har forbindelse til et netværk (tjek for overbelastet eller utilgængeligt netværk).
- Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret.

Lydkvaliteten under opkald er ikke optimal:

- Under et igangværende opkald har du mulighed for at justere på lydstyrken ved brug af tasterne **Venstre** og **Højre**.
- Kontroller GSM modtagelsesniveauet ved at benytte genvejen **Firkant + 1** tasten.

Intet telefonnummer ringes op når jeg vælger en kontaktperson fra min liste:

- Tjek at du har angivet et telefonnummer til kontaktpersonen.
- Er du udenlands skal du være opmærksom på om landekoder er indtastet.

Personer der ringer til mig kan ikke efterlade telefonsvarebeskeder:

- Kontakt din udbyder for at sikre dig at de tilbyder en Voicemail tjeneste.

Jeg kan ikke tilgå min Voicemail:

- Tjek at telefonnummeret til din Voicemail, tilbudt af din udbyder, er angivet korrekt.
- Forsøg igen senere, da netværket kan være overbelastet.

Mit SIM kort er låst:

- Du har angivet en forkert PIN kode tre gange i træk - tag kontakt til din udbyder eller angiv din PUK kode for at låse SIM kortet op igen.

Hvordan gendanner jeg min MiniVision 2?

I situationer hvor du oplever at din MiniVision 2 er utilgængelig eller opfører sig mærkeligt kan du med fordel udføre en gendannelse af hele telefonen, eller nulstille enkelte parametre: Det kan du gøre ved at foretage et opkald til en af de følgende koder ved brug af det fysiske tastatur og direkte fra Hjemmeskærmen, og bekræfte med **OK** knappen:

- ***# 111 #:** Ring til dette nummer for at nulstille alle Tilgængelighedsindstillinger.
- ***# 333 #:** Ring til dette nummer for at påbegynde en komplet gendannelse af enheden. Det betyder at alle personlige data fjernes (Kontaktpersoner, noter, beskeder, begivenheder, Wi-Fi indstillinger og så videre).
- ***#444#:** Giver dig adgang til "Access Point Name" indstillingen (avanceret).
- ***# 555 #:** Giver dig mulighed for at skifte systemsprog.

Om dette dokument

Informationen publiceret i dette dokument kan ændres uden varsel. KAPSYS forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette dokument uden forpligtelse til at informere personer eller virksomheder. KAPSYS fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler herved - ej heller for skade der sker tilfældigt eller som følge af brugen af dette dokument. KAPSYS bestræber sig på løbende at forbedre kvaliteten og funktionerne af deres produkter og KAPSYS opfordrer til regelmæssigt at besøge websitet (www.KAPSYS.com) for at hente de seneste opdateringer og dokumentation omhandlende brugen af produkterne. Dette produkt lever op til kravene for CE mærkning som defineres for private, erhverv og industrielle miljøer. Benytter du produktet ved fuld lydeffekt kan det resultere i langvarige høreskader.

Juridisk information og reklamation

Forholdsregler for brug og Anbefalinger

- Håndter din MiniVision enhed og tilbehør med forsigtighed, tab eller stød det ikke.
- Forsøg ikke at udføre reparationer på enheden da dette resulterer i øjeblikkelig ophør af garanti og reklamation samt risiko for at skade enheden unødigt.
- Rengør kun enheden ved at benytte en blød, let fugtig klud. Benyt ikke kemikalier, rengøringsmidler eller slibemidler som kan beskadige enheden.
- Dette produkter ikke vandtæt, beskyt det fra fugt, damp og væsker.
- Benyt aldrig enheden tæt på en varmekilde og undgå at opbevare den i varme, fugtige eller korroderende miljøer.
- Benyt ikke produktet tæt på magnetiske felter.
- Benyt ikke enheden hvis skærmen er ødelagt eller knækket da dette kan resultere i skader.
- Benyt ikke enheden i eksplosionsfarlige områder.
- Benyt ikke enheden ved sundhedsfaciliteter og spørg altid om tilladelse før du benytter telefonen nær medicinsk udstyr.
- Oplad ikke dit produkt i temperaturer under 0°C (32°F) eller over 45°C (113°F)
- Benyt ikke produktet i områder med høje og lave temperaturer. Drift temperatur intervaller: -10°C (14°F) til +55°C (131°F), opbevaringstemperaturen i kortere perioder er: -20°C (-4°F) til +60°C (140°F), opbevaringstemperaturen i længere perioder er: -10°C (-4°F) til +25°C (77°F).
- Længere tids brug af produktet kan gøre enheden varm, dette er helt normalt.
- For optimalt brug anbefales det at slukke helt for enheden fra tid til anden og fjerne batteriet i 30 minutter.

Sundhed og Sikkerhed

- Sørg for at produktet er uden for rækkevidde for små børn.
- Hold altid hænderne fri, når du kører bil: Kør ansvarligt og følg gældende sikkerhedsregler.
- Pas på din hørelse: Undgå længere tids eksponering for høje lyd niveauer når du benytter hovedtelefonerne, højttalerne eller modtageren.
- Såfremt du har en pacemaker eller lever sammen eller tæt på personer som har, søg venligst råd og vejledning hos din læge eller producenten af pacemakere i forholdt til forespørgsler og brug af din trådløse enhed.
- Radio transmissionsudstyr kan forstyrre sikker og pålideligt brug af medicinsk udstyr der måske ikke er tilstrækkeligt beskyttet.

Warranty (ENGELSK)

In case of breakdown, please contact your reseller.

No warranty is given on the product, regardless of the malfunction encountered, in the following cases:

Normal wear of the product and reduced battery charging and storage capacity

Damage resulting from improper use, moisture or liquids, proximity or exposure to a heat source

The device cracked or broken or showing visible signs of impact

Failure to observe the precautions for use, accidents, negligence, misuse or use not in accordance with the instructions supplied with the appliance or commercial use of the product

Shorting the battery or using the battery in a device other than your product

The use of accessories or connectors not recommended by the manufacturer

Damage caused by repairs or attempted repairs by persons not authorized by KAPSYS.

It is recommended that you perform one or more backups of the data saved in your product. The reseller cannot be held responsible for the loss of this data as a result of a malfunction, repair or replacement of the product.

Any malfunction related to network services and / or cellular system cannot be guaranteed. You should contact your network service provider directly for assistance.

Specific Absorption Rate Information (ENGELSK)

Your MiniVision 2 is a transceiver. It has been designed to comply with the limits set by the European Union's recommendations for exposure to radio frequencies.

The exposure guidelines for mobile devices are based on a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR).

The highest value for using this device is:

- Ear: 1.77 W / Kg (on a 10 gram cell tissue)
- Body: 1.85 W / Kg (on a 10 gram cell tissue)
- Limbs: 3.02 W/Kg (on a 10 gram cell tissue)

The SAR limit defined in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts / kilogram (W / kg) averaged over 10 grams of tissue.

In tests to determine SAR, the device is used in standard operating positions and operates at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of a device in use may be less than the maximum value because the device is designed to use only the power needed to reach the network. This value changes depending on a number of factors such as the distance to a base station of the network.

In the case of use of the product held by hand and not worn by the ear, or carried close to the body, it is recommended to maintain a separation distance between the body and the back of the product greater than 1.5 cm.

The use of accessories may change the SAR values. The SAR values may vary according to the testing and reporting standards in force in different countries and according to the network band

Kundeservice

For yderligere information og assistance skal du kontakte din forhandler.

Du er også velkommen til at kontakte producenten KAPSYS' og deres Kundeservice - 694, venue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie – Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France, og du kan også besøge deres website: www.kapsys.com.

Varemærker

Virksomheder og produktmærker som refereres til i dette dokument og i andre KAPSYS brugervejledninger, er alle varemærker, registreret eller ej, ejet af deres respektive ophavsmænd. KAPSYS produkter, brands og logoer er registrerede varemærker fra KAPSYS SAS.

Bluetooth produkter, brands og logoer er registrerede varemærker fra Bluetooth SIG Inc.

Nuance er et registrerede varemærker fra Nuance Corporation Inc.

Alle mærkenavne samt produktnavne er firmanavne eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Indeks – Navigationstasterne

Tabellen herunder præsenterer de forskellige funktioner som tasterne i den øverste del af det alfanumeriske tastatur har:

Tast	Handling
Hurtigt tryk på Besvar opkald	Besvarer et indgående opkald når din MiniVision ringer Åbner op Telefon funktionen
Tryk og hold på Besvar opkald	Åben Opkaldshistorik
Hurtigt tryk på Afbryd opkald	Springer tilbage til Hjemmeskærm Aktiverer / Deaktiverer dvaletilstand Afbryder et aktuelt opkald Afviser et indgående opkald
Tryk og hold på Afbryd opkald	Tænder / Slukker for din MiniVision 2
Hurtigt tryk på Op	Navigerer til elementet oven over
Hurtigt tryk på Ned	Navigerer til elementet neden under
Tryk og hold på Op	Springer direkte til det øverste element
Tryk og hold på Ned	Springer direkte til det nederste element
Hurtigt tryk på Venstre	Sænker lydstyrken for skærmlæseren Flytter markøren til venstre i et redigeringsfelt
Hurtigt tryk på Højre	Øger lydstyrken for skærmlæseren Flytter markøren til højre i et redigeringsfelt
Hurtigt tryk på OK	Aktiverer / Bekræfter det valgte element
Tryk og hold på OK	Aktiverer talegenkendelse i et redigeringsfelt (diktering)
Hurtigt tryk på Tilbage	Vender tilbage til forrige skærmbillede Sletter en karakter i et redigeringsfelt
Tryk og hold på Tilbage	Slet al indhold i et redigeringsfelt

Hurtigt tryk på **Menu**

Åbner kontekst menuen

Indeks – Alfanyumeriske taster

Tast	Handling
Hurtigt tryk på 1	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): 1 . ? ! @ - _ , ' \ " () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¢ \ [] { } \ ~ ^ ç ì §
Hurtigt tryk på 2	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): a b c 2 æ å A B C Æ Å.
Hurtigt tryk på 3	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): d e f 3 D E F
Hurtigt tryk på 4	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): g h l 4 G H I
Hurtigt tryk på 5	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): j k l 5 J K L
Hurtigt tryk på 6	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): m n o 6 ø M N O Ø
Hurtigt tryk på 7	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): p q r s 7 P Q R S
Hurtigt tryk på 8	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): t u v 8 T U V
Hurtigt tryk på 9	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): w x y z 9 W X Y Z
Hurtigt tryk på 0	Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): Mellemrum, 0, Ny linje
Hurtigt tryk på Stjerne	Skifter tastaturtilstand (cirkulerer): Normal tastatur, Store bogstaver, Numerisk
Hurtigt tryk på Firkant	Første gang: Åbner en liste over special karakterer: . , ; : ! ? @ & > < = - + * / \ # () { } [] % " ' ~ ^ 2 \$ € £ § _ Anden gang: Åbner liste med humørikoner

Bemærk venligst at humørikoner kan bruges i et begrænset omfang, og det kan derfor ikke forventes at humørikoner du modtager fra andre er tilgængelige.

Indeks – Tilgængelighedsgenveje

Tabellen herunder præsenterer forskellige tilgængelighedsgenveje som kan bruges hvorend du befinder dig på din MiniVision mobiltelefon:

Genvej	Handling
Firkant + 1	Annoncerer status for din MiniVision: Klokkeslæt, batteriniveau, Wi-Fi status, Bluetooth status samt netværks status.
Firkant + 2	Læser alle elementer i listen, en efter en, med start fra toppen.
Firkant + 3	Genvej ikke tildelt.
Firkant + 4	Sænker hastigheden på skærmlæseren.
Firkant + 5	Øger hastigheden på skærmlæseren.
Firkant + 6	Genvej ikke tildelt.
Firkant + 7	Gentager den seneste skærmlæser annoncering.
Firkant + 8	Staver det seneste element læst af skærmlæseren (karakter for karakter).
Firkant + 9	Genvej ikke tildelt.
Firkant + 0	Åbner Indstillinger.
Firkant + Op	Genvej ikke tildelt.
Firkant + Ned	Genvej ikke tildelt.
Firkant + Venstre	Indstillinger ringetone til Lydløs (0 ud af 7)

Firkant + Højre

Indstillinger ringetone til Udendørs
(7 ud af 7)

Indeks – Genveje under redigering

Tabellen du præsenteres for herunder indeholder de forskellige genveje som du kan bruge i redigeringsfelter:

Genvej	Handling
Stjerne + 1	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 2	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 3	Klipper den markerede tekst.
Stjerne + 4	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 5	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 6	Kopierer den markerede tekst.
Stjerne + 7	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 8	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + 9	Indsæt den markerede tekst.
Stjerne + 0	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + Op	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + Ned	Genvej ikke tildelt.
Stjerne + Venstre	Markerer karakteren til venstre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit).

Stjerne + Højre

Markerer karakteren til højre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit).